



Innovative non-invasive
mesoterapi løsninger

mesoskinline[®]

MILANO · HAMBURG · COPENHAGEN *By Aleksandra Kjaersfeldt*



mesoskinline® meso-cocktails er yderst virksom til regenerering og foryngelse af huden

Huden udglattes og tilføres derudover fugt. De aktive substanser (**mesoskinline®** meso-cocktails), der indeholder hyaluronsyre, bliver skånsomt implementeret i overhuden med specialdesignede MESO moduler eller tilsvarende moduler/produkter.

Med meso-moduler kan man sikkert, effektivt og smerte-frit indgive **mesoskinline®** meso-cocktails i epidermis.

De aktive ingredienser tilfører huden fugt og stimulerer regenereringen af kollagen og elastiske fibre.

Den effektive og effektfulde virkning, der kendetegner **mesoskinline®** viser sig efter blot få behandlinger.

Du vil ikke være i tvivl, når du ser de øjeblikkeligt synlige resultater.

mesoskinline® meso-cocktails produceres i EU af et anerkendt farmaceutisk laboratorium med over 20 års erfaring i forskning, udvikling, innovation, fremstilling og distribution af medicinske produkter samt æstetik- og hudplejeløsninger til skønhedsinstitutter og hudklinikker.

Alle råmaterialer er nøje udvalgt af os med det formål at sikre, at de lever op til de krav, der stilles til meso-cocktails og andre meso-produkter.

Produktionsprocessen er underlagt kontrol i overensstemmelse med kvalitetssystemerne ISO 9001 og ISO 13485. Efter fremstilling testes og inspiceres alle produkter inklusiv emballage osv.

Vores mission er at være førende på markedet inden for:

- Produkter og udstyr til professionelle behandlere
- Udvikling af nye produkter med unikke ingredienser i samarbejde med nogle af Europas dygtigste forskere og laboratorier
- Kosmetiske, medicinske, æstetiske behandlinger og uddannelser

Vi stræber efter hele tiden at have den nyeste viden og de stærkeste kompetencer.





Bliv distributør eller partner

mesoskinline® ligger i front, hvad angår innovation og viden inden for non-invasiv mesoterapi, og tilbyder produkter af høj kvalitet. Er du interesseret i at samarbejde med **mesoskinline®** i dit land eller din region og blive forhandler eller distributør af **meso-skinline®**?

Kontakt os og hør om dine muligheder.

mesoskinline®

mesoskinline ApS

Juelsmindevej 57 - DK-7120 Vejle, Denmark

E-mail: sales@mesoskinline.com

Klinisk testede resultater til
behandling af ethvert trin
i aldringsprocessen



mesoskinline®

MILANO - HAMBURG - COPENHAGEN *By Aleksandra Kjaersfeldt*



mesoskinline[®] meso-cocktails
for several indications with exclusive formula

TESTED PRODUCT FOR NON-INVASIVE MESOTHERAPY
DERMATOLOGICALLY TESTED



MESO FRESH VITAMIN

rebuilding the skin

Side 7

MESO CHEEK LIFT

activates cell reconstruction

Side 9

MESO EYE LIFT

anti-flaccidity treatment

Side 11

MESO NECK AND DECOLLETEE LIFT

DMAE, elastin, organic silicium to restore the skin

Side 13

MESO HAIR LOSS CONTROL

eight actions to reidentify

Side 15

MESO STRETCH MARK REMOVER


stimulates wound healing and tissue regeneration

Side 17

MESO SKIN PERFECTOR

stimulates wound healing and tissue regeneration

Side 17

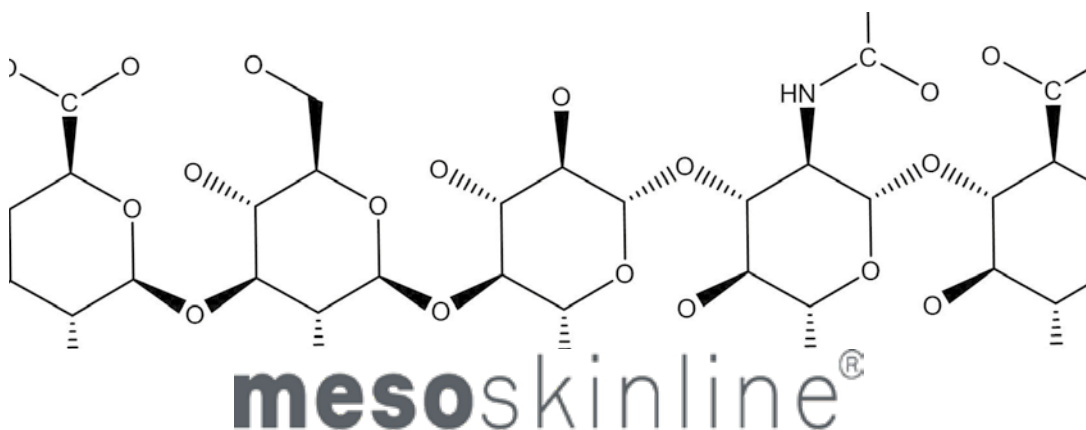



MESO FRESH VITAMIN

rebuilding the skin

Genopliv huden med MESO FRESH VITAMIN

MESO FRESH VITAMIN er et vigtigt produkt inden for mesoterapi, der stimulerer og genopliver slidt hud. Produktet er et velvalgt middel mod dehydrering, rynker og solskader.

Behandling med MESO FRESH VITAMIN hjælper med at opnå et godt niveau af cellulær hydrering og god biokemisk og biologisk arkitektur.

Takket være indholdet af hyaluronsyre anbefales det også til brug omkring bl.a. øjenområdet, der vil blive betydeligt forbedret efter 1-2 behandlinger.

Hurtige og synlige resultater

MESO FRESH VITAMIN består af en række naturlige stoffer af høj kvalitet, som derfor optages nemt i huden. Det giver synlige og hurtige resultater.

MESO FRESH VITAMIN er skånsom og bruges ofte sammen med andre behandlinger. Produktet forhindrer ikke aldring, men det forsinker processen markant.

Gennem behandlingen opnår huden friskhed og en ungdommelig glød, som allerede er tydelig efter første behandling. MESO FRESH VITAMIN er effektiv og for-skønnende velvære, når det er bedst.

Behandlingen er en målrettet sundhedsbooster for huden, og med sine rynkerreducerende egenskaber egner produktet sig også godt til patienter, der ryger og generelt ikke har passet godt på deres hud.

Reducer og fjern rynker med MESO FRESH VITAMIN

Ligesom flere andre mesoskinline®-produkter til professionelle behandlinger indeholder MESO FRESH VITAMIN hyaluronsyre, der produceres naturligt i kroppen og findes i væv og legemsvæsker hos alle mennesker.

Molekylet har en unik evne til at binde store mængder fugt i huden.

Hyaluronsyres hydrerende egenskaber er især en fordel i forbindelse med rynkerreduktion. Ved små rynker, f.eks. omkring øjnene, kan en enkelt MESO FRESH VITAMIN-behandling være nok, mens dybere rynker behandles med gentagne behandlinger.

Skånsom og effektiv

MESO FRESH VITAMIN er både skånsom og effektiv og egner sig til mange forskellige hudtyper, skader og aldringstegn, og behandlingen forbedrer både kollagenfibrene og mikrocirkulationen i huden. Resultatet er en fastere og mere smidig hud, der stråler af sundhed.

Produktet har ingen bivirkninger, og det er derfor muligt at behandle større områder samtidig uden gener.

De ingredienser, som indgår i mesoskinline®-produkter, er alle godkendte lægemidler, som er udvalgt i henhold til den generelle lægepraksis. De er pakket under kliniske forhold i praktiske hætteglas og engangsampuller for at undgå spild eller iltning.

Produkterne er klar til brug og er derfor nemme og hurtige at anvende i en travl hverdag. MESO FRESH VITAMIN anbefales ikke til gravide eller til patienter med akne og mere alvorlige hudproblemer.

Primære aktive ingredienser (34 i alt)

Naturlige stoffer af høj kvalitet. Hyaluronsyre, Retinol, 21 aminosyrer, Multivitaminer - (Bla. D-Biotin, Vitamin A, B12, Aceate)

MESO FRESH VITAMIN

rebuilding the skin

Primære behandlingsområder

- Ansigt
- Læbeområde
- Kinder

Behandling afhjælper

- Anti-Aging
- Forbedrer stresset hud
- Reducerer delvist mindre rynker
- Forbedrer den kedelige, uregelmæssige hud (hos nogle patienter, der er rygere, eller som ikke har taget sig af deres hud.)
- Dybere rynker (mimikrynker)
- Omkring øjenområdet
- Fugtighedsgivende og toningseffekt

Tip og behandlingsfrekvens

- En gang ugentlig i 4 - 6 uger
- Yderst effektiv til grålig og mat hud, som ikke har været beskyttet mod sol, eller som ikke har fået regelmæssig pleje.



Indhold:

- 10 x hætteglas a' 5 ml
- 10 x transparente engangs pipetter
- Til 10 behandlinger

Varenr.:

MST105



MESO CHEEK LIFT

activates cell reconstruction

MESO CHEEK LIFT aktiverer cellernes genopbygning

Få bugt med rynker, løs hud, arvæv og strækmærker

Linjer i ansigtet er resultat af vores mimik og aldersforandringer i vævet. Linjerne bliver tydeligere og dybere med hvert år, da huden mister sin fasthed og elasticitet.

Vi bruger omkring 60 muskler når vi kommunikerer både gennem tale og med ansigtsudtryk. Forskellige mimiske udtryk når vi viser overraskelse, glæde, vrede eller koncentration er den hyppigste årsag til linjer mellem brynene, langs panden, ved øjnene, fuger ved munden og linjer på kinder. Hyppig brug af disse ansigtsbevægelser fører til permanente dybe linjer på panden, smilerynker og kragetæer. Ud over injektionen er der et klart forbrugernes behov for effektive, sikre, aktuelle behandlinger. MESO CHEEK LIFT er en non-invasiv form for mesoterapi baseret på de regenerative og stimulerende egenskaber hos peptider.

Formlen MESO CHEEK LIFT indeholder SYN®-AKE. SYN®-AKE er en syntetisk tripeptide med lille molekulvægt, som har stærk antiage virkning mod mimiske linjer og er en af de vigtigste nøgleingredienser i Meso Cheek Lift. SYN®-AKE udglatter mimikrynker ved topisk applikation. SYN®-AKE har en naturlig mekanisme, hvor der kommer øjeblikkelig og vedvarende afslapning af mimiske rynker ved at blokere neuronal transmission på den nicotinske acetylcholin receptor.

Peptidet er en antagonist af den muskulære nikotinacetylcholinmembranens receptor (mnAChR). Da de muskulære nicotinske ACh-receptorer blokeres, forbliver ionkanalen lukket. Der er ingen optagelse af Na⁺, og muskelcellerne forbliver afslappet. Overførslen af nerveimpulser til musklerne hæmmes, og ansigtsmusklerne er afslappede uden at være lammet.

MESO CHEEK LIFT næring til en stærk, smidig hud

MESO CHEEKLIFT er en non-invasiv form for mesoterapi, som indeholder de tre vigtigste vitaminer for hudens velvære (A-C-E). Disse vitaminer er præsenteret i de mest stabile former i MESO CHEEK LIFT for at sikre deres optimal optagelse i huden.

E-vitamin og C


Disse to essentielle vitaminer har en naturlig evne at beskytte celler mod skade fra frie radikaler og beskytte huden mod farlige eksterne faktorer (forurening, UV-A UV-B), som kan forårsage for tidlig aldring.

Vitamin A

Retinol holder huden intakt og reparerer beskadigede celler. Vitamin A reparerer og genopbygger skadet eller sart hud (revner, rødme og irritation). Det udfører også en sebum-regulerende funktion, som afbalancerer hudens store olieproduktion.

Primære aktive ingredienser (30 i alt)

Sodium PCA, Vitamin (A-C-E), SYN®-AKE

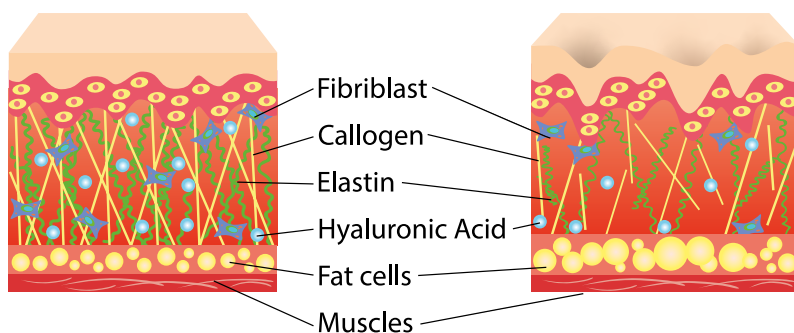

MESO CHEEK LIFT activates cell reconstruction

Primære behandlingsområder

- Ansigt
- Krop

Behandling afhjælper

- Anti-Aging, Tidlig aldring
- Forbedrer hudens tekstur og bindevæv
- Rynker
- Arvæv
- Strækmærker

Tip og behandlingsfrekvens

- En gang ugentlig i 8 uger
- Yderst effektiv hvor huden (især på kinder) har mistet sin elasticitet

Fordele

- Markant foryngende effekt, der er særligt effektiv mod mimiske linjer
- Tydelig reduktion af linjernes dybde efter kun en måned
- Hjælper dit ansigt til at slappe af uden at miste evnen til at udtrykke sig
- Indeholder 3 vitaminer (A-C-E) og essentielle aminosyrer, som er afgørende for hudens genopbygning



Indhold:

- 10 x hætteglas a' 5 ml
- 10 x transparente engangs pipetter
- Til 10 behandlinger

Varenr.:

MST102



Organisk Silicium

Silicium er en af de vigtigste spormineraler og er en væsentlig bestanddel af huden. Ved at interagere med elastiske proteiner i dermis, såsom kollagenfibre, elastin og proteoglycaner sikrer siliciumet optimal sund fast hudstruktur, bindevævs styrke og elastitet.

Desuden viser mange undersøgelser, at silicium er i stand til at stimulere hudcellemetabolismen (fx kollagenproduktion, kontraktionsevne), styrker karvæggene, fremmer sårheling og styrker såvel hud som slimhinder.

DMAE:

Flere undersøgelser har vist, at den aktuelle anvendelse af DMAE kan forbedre ansigtets udseende væsentligt og forynge det.

Det er blevet suppleret med de komponenter, der hjælper til den korrekte udvikling af muskelvæv, aldring og træthed, cellulær genoplivning, muskelstimulerende midler, adynamia og muskeltræthed.

MESO EYE LIFT

anti-flaccidity treatment

Den mest effektive meso-cocktail til opstramning af huden

MESO EYE LIFT er en effektiv meso-cocktail der er sammensat til at modarbejde hudens alderstegn.

Meso-cocktailen indeholder alle de mellemliggende stoffer i Krebs cyklus, bl.a. DMAE og carnosin, der begge er kendt for deres opstrammende og styrkende egenskaber og som er den centrale energigivende del af den aerobe oxidation.

MESO EYE LIFT stimulerer og aktiverer de relative enzymatiske funktioner på mitokondrierne, der fungerer som cellernes kræftværk.

Det fjerner de forhindringer, der opstår ved cellens indtræden i mælkesyrefasen.

MESO EYE LIFT forsinker hudens aldring

Vores hud ældes som resultat af forskellige interne og eksterne faktorer. Vores gener er vigtige, men andre parametre som rygning, kost, påvirkning af UV-stråler, stress og hormonelle tilstande har også meget at sige.

I alle tilfælde skader aldringen både hudens celler, molekyler og den ekstracellulære matrix. Resultatet bliver et synligt tab af elasticitet og fasthed i huden, som bliver rynket og løs.

Når kroppen og hudens fibroblast ældes sker der samtidig et fald i syntesen og vedligeholdelsen af det ekstracellulære matrix.

MESO EYE LIFT bremser forfaldsprocessen ved at tilføre den næring, der skal til, for at fibroblasterne fungerer optimalt og gradvist fornyes.

Fastere hud uden bivirkninger

MESO EYE LIFT indeholder dimethylaminoethanol eller DMAE, der er kendt for at øge hudens fasthed.

En anden vigtig ingrediens er dipeptidet carnosin, der er afledt af histidin og ligeledes kendt for sine opstrammende egenskaber.

MESO EYE LIFT har ingen bivirkninger, og behandlingen er kompatibel med andre meso-cocktails og botulinum toksiner.

Den er derfor et både skånsomt og effektivt middel til en fastere og stærkere hud. Meso-cocktailen er desuden negativ i dopingsammenhænge.

- Forbedrer stresset hud
- Reducerer delvist mindre rynker
- Forbedrer kedelig og uregelmæssige hud hos nogle patienter, der er rygere, eller som ikke har taget sig af deres hud
- Ansigtformen fremstår tydeligere
- Stimulerer sammentrækningen af hudens muskulære filamenter med dens strammere effekt
- Er kompatibel med det botuliniske toksin
- Forbedrer hudens fugtgivende virkning, fanger frie radikaler og beskytter mod ydre slid

Primære aktive ingredienser (30 i alt)

DMAE, Aminosyrer, Multivitaminer (B1, B2, B6), Organisk silicium

MESO EYE LIFT anti-flaccidity treatment

Primære behandlingsområder

- Ansigt
- Omkring øjnene
- Hals
- Decolletee

Behandling afhjælper

- Anti-aging, tidlig aldring
- Gendanner ansigtets ungdommelige form og normale farve
- Opstrammer/løfter huden og er desuden kompatibel med botulinum-toksiner
- Fanger frie radikaler og beskytter mod eksterne hudskader
- Yderst effektiv til beskadiget, moden og uren hud
- Specielt egnet til opstramning omkring øjnene

Tip og behandlingsfrekvens

- En gang ugentlig i 4-8 uger
- Bruges også på tynd og dehydreret hud, hvor øvre ansigt og hals er i fokus og har brug for ekstra opstramning.



Indhold:

- 10 x hætteglas a' 5 ml
- 10 x transparente engangs pipetter
- Til 10 behandlinger

Varenr.:

MST104

DMAE

Dimethylaminoethanol, også kendt som DMAE eller dimethylethanolamine, er et organisk stof og en vigtig antioxidant i den cellulære plasmamembran. Det er en præcursor og er altså en forbindelse, der danner en anden forbindelse. I dette tilfælde acetylcholin.

Acetylcholin er en neurotransmitter, som muliggør en passage af stimuli mellem nerver og muskler. Når det anvendes på huden, har det en let opstrammende effekt, da det stimulerer en muskelkontraktion.

Forsøg med DMAE viser, at stoffet gør huden strammere, at det opstrammer hud omkring øjnene og læberne samt giver et defineret omrids af ansigtet – hvilket også inkluderer opstramning af hals og hage. In vitro-tests afslører, at påføring af DMAE medvirker til en markant hævelse i kroppens vigtigste bindevæv, fibroblast. Hævelsen sker i vakuolerne, der fungerer som et cellulært depotområde.

Nogle har et indtryk af, at DMAE er Botox i cremeform, men det er langt fra rigtigt. DMAE har præcis den modsatte virkning. For hvor Botox stimulerer musklerne, blokerer og lammer Botox dem. Derfor kan DMAE ikke anbefales til dybe linjer mellem øjenbrynene, men stoffet er et effektivt middel mod slaphed i huden og kan med fordel bruges til f.eks. opstramning af huden på halsen.

MESO NECK AND DECOLLETEE LIFT

DMAE, elastin, organic silicium to restore the skin

Opstramning af hals og hage med MESO NECK & DECOLLETEE LIFT

MESO NECK & DECOLLETEE LIFT er en effektiv metode til sund og fast hud. Det er et fedtfrit Meso-produkt til ansigtsområdet, der reducerer rynker og f.eks. kan anvendes til opstramning af huden på halsen. Behandlingen er fuldstændig ufarlig og er uden bivirkninger, og den er derfor et rigtigt godt alternativ til f.eks. botox.

MESO NECK & DECOLLETEE LIFT indeholder tre vigtige stoffer, der er centrale for at opnå et vellykket, rynkereducerende resultat. MESO NECK AND DECOLLETEE er det første produkt, der kombinerer DMAE, elastin og methylsilanol, og det gør produktet til den mest avancerede rynkereducerende Meso-hudpleje på markedet i dag. Den store elasticitet skyldes proteinets komplicerede sammensætning af krydsbundne peptidkæder. Dele af dem folder på en måde, så molekylet kan strækkes 50-80 % og stadig vende tilbage til det oprindelige udgangspunkt.

MESO NECK & DECOLLETEE LIFT er primært sammensat af aminosyrerne glycine, valine, alanine og proline. Det er et specialiseret protein med en stor molekylvægt på 64 til 66 kDa. Med alderen mindskes mængden af elastin i vævene, og huden mister sin elasticitet. Med det helt rigtige indhold af elastin, regenererer og genopbygger MESO NECK & DECOLLETEE LIFT hudens elasticitet og får den til at se yngre og fastere ud.

MESO NECK & DECOLLETEE LIFT er et fantastisk alternativ til Botox. Dens formel reducerer effektivt udseendet af rynker og fine linjer på alle områder af hud, krop og ansigt.

Methylsilanol mannuronat

Methylsilanol mannuronat er en organisk forbindelse deriveret fra tang. Tangplanten er kendt for sine afgiftende egenskaber, og methylsilanol mannuronat fungerer som en antioxidant, der forebygger tidlig aldring.

Methylsilanol mannuronat har længerevarende, fugtighedsgivende egenskaber, der bekæmper nedbrydningen af kollagen og elastinfibre. Derfor har forbindelsen en opstrammende og styrkende effekt på huden. Forbindelsen er desuden kendt for at bekæmpe frie radikaler.

In vitro-undersøgelser viser, at methylsilanol mannuronat normaliserer cellernes forbrænding, virker regenererende på vævet og bidrager til reduktion af appelsinhud uden at give bivirkninger.

Methylsilanol mannuronat er en sikker og naturlig ingrediens inden for hudplejeprodukter, og The Environmental Working Group har bedømt forbindelsen 100 % sikker til kosmetisk brug. Kombinationen af DMAE, elastin og methylsilanol mannuronat gør MESO NECK & DECOLLETEE LIFT til en unik behandling til at mindske rynker samt til opstramning af f.eks. hals og hage.

Primære aktive ingredienser (12 i alt)

DMAE, Elastin, Organisk silicium

Elastin

Elastin er et ultraspecialiseret elastisk protein i hudens og blodkarrenes bindevæv. Elastin er også et vigtigt bærende væv, som anvendes på steder, hvor der er brug for mekanisk energi. Forfrisker, nærer og fugter huden og reducerer synligheden af fine linjer og rynker.

Tilfører et beskyttende lag til hud og hår.

MESO NECK AND DECOLLETEE LIFT

DMAE, elastin, organic silicium to restore the skin

Primære behandlingsområde

- Ansigt
- Hals
- Decolletee
- Krop

Behandling afhjælper

- Anti-aging, tidlig aldring
- Opstramning af huden på halsen og décolletè
- Mindsker længde og dybde af rynker
- Forebygger og reducerer rynker eller strækmærker
- Øger hudens elasticitet og stimulerer kollagen-dannelse

Tip og behandlingsfrekvens

- Én gang hver 7.-10. dag i otte uger
- Effektiv mod tydelige linjer samt tynd og løs hud på hals og décolletè.




Indhold:

- 10 x hætteglas a' 5 ml
- 10 x transparente engangs pipetter
- Til 10 behandlinger

Varenr.:

MST106

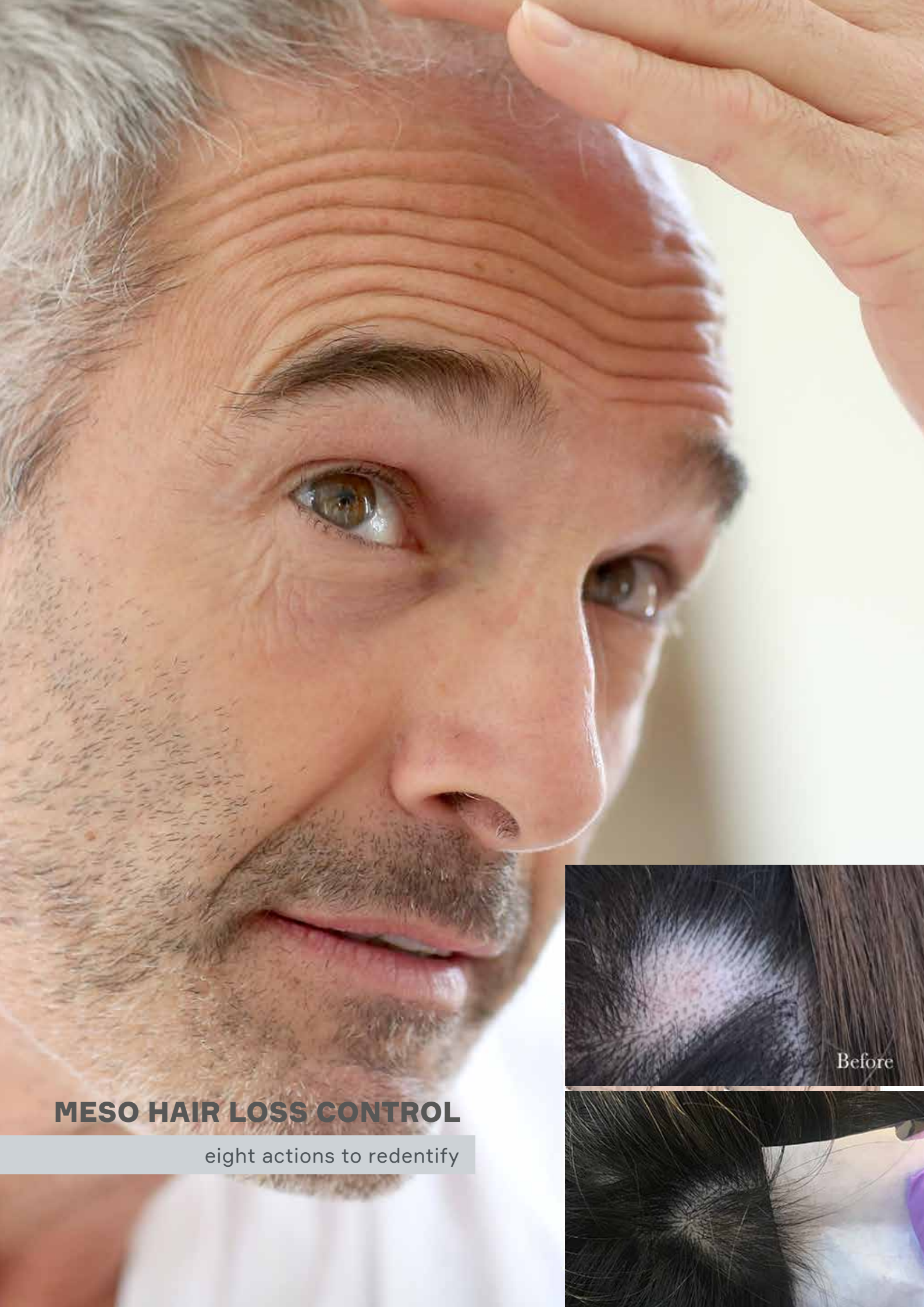

MESO HAIR LOSS CONTROL

eight actions to reidentify



MESO HAIR LOSS CONTROL

Et effektivt middel mod hårtab

MESO HAIR LOSS CONTROL er et unikt middel mod hårtab, der bekæmper tab af hår og stimulerer ny vækst. MESO HAIR LOSS CONTROL øger blodgennemstrømningen og ilter hovedbunden. Produktet indeholder præcis den sammensætning af vitaminer, aminosyrer og mineraler, der kræves for at få det fulde udbytte af kroppens forbrænding. MESO HAIR LOSS CONTROL sikrer permanent biotilgængelighed og optimerer på den måde produktionen af keratinproteiner. Behandlingen sikrer den præcise sammensætning af aminosyrer, der skal være til stede i et sundt hår, og som er afgørende i et middel mod hårtab.

Det er MESO HAIR LOSS CONTROL godt for:

- Velegnet til behandling af ikke genetisk hårtab
- Reparerer og stimulerer hår, der er skadet af miljømæssige faktorer såsom sol og forurening
- Reducerer hårtab
- Fjerner skæl og talgkirtler og behandler tyndt og livløst hår

Savpalme: et effektivt middel mod hårtab

Savpalme anvendes primært af mænd for at lette symptomerne på prostatahyperplasi, som er en forstørrelse af prostata, men ikke en cancertilstand. Undersøgelser af behandling af forstørret prostata med savpalme indikerer, at palmen også stimulerer hårvækst, og det tyder på, at savpalme har samme effekt som finasterid, men uden bivirkninger. MESO HAIR LOSS CONTROL optimerer produktionen af keratinproteiner ved at sikre en permanent biotilgængelighed. Behandlingen sikrer den præcise sammensætning af aminosyrer, der skal være til stede i et sundt hår, og som er afgørende i et middel mod hårtab. MESO HAIR LOSS CONTROL reducerer hårtab, og i nogle tilfælde stopper behandlingen hårtabet helt. Efter de anbefalede ti behandlinger med MESO HAIR LOSS CONTROL øges den gennemsnitlige diameter af hårstrået, og håret bliver mere fyldigt at se på.

Biotin: styrker håretr

Biotin er et B-vitamin, som indgår i flere forskellige stofskiftreaktioner og i regulering af sukkeromsætningen. Nogle gange betegnes biotin som vitamin H eller vitamin B7. Vitaminet er vandopløseligt, og kroppen kan aldrig indeholde et for højt niveau af biotin, da det på et vist tidspunkt vil blive udskilt med urinen. Det er blandt andet på grund af vitaminet, at MESO HAIR LOSS CONTROL er så effektivt et middel mod hårtab og bidrager til at øge hårets sundhed. Lukose er en væsentlig energikilde og vigtig for både vedligeholdelse af kroppen og for, at den performer så godt som muligt. Biotin har en essentiel rolle, når kroppen forarbejder glukosen, og vitaminet er betydningsfuldt, når kroppen modarbejder slid og forfald. Både vækst og replikation af cellerne afhænger af biotin, og vitaminet hjælper med at bevare hårets sundhed og genopbygning, ligesom det har en vigtig rolle for vedligeholdelse af mange af kroppens andre funktioner. Biotin er det vitamin, der gør håret sundt, stærkt og smukt. Det er klinisk dokumenteret, at kroppens niveau af biotin er lige så grundlæggende som dens niveau af andre vitaminer og mineraler.

Reducer eller stop hårtab

MESO HAIR LOSS CONTROL er en effektiv og velunderbygget behandling, der virker gennem 8 stadier. På den måde adskiller den sig fra andre behandlinger, der har færre aktive indsatsområder.

Primære aktive ingredienser (44 i alt)

Savpalme, Panthenol, Cystein, Taurine, Biotin.

MESO HAIR LOSS CONTROL

eight actions to redentify

Primære behandlingsområder

- Hovedbund

Behandling afhjælper

Stopper hårtabsprocessen gennem 8 stadier:

- Stimulerer mikrocirkulationen
- Virker 5-alfa-reduktasehæmmere
- Regulerer produktionen af talg
- Giver næring til hårrødderne
- Øger hårstråenes tykkelse
- Genopbygger kutikula
- Styrker hårets medulla
- Gør håret glansfuldt

Tip og behandlingsfrekvens

MESO HAIR LOSS CONTROL reducerer hårtab og i nogle tilfælde kan behandlingen endda stoppe hårtab. Efter de anbefalede ti behandlinger en gang om ugen med MESO HAIR LOSS CONTROL, øges den gennemsnitlige hårtykkelse, og håret kan se fyldigere ud.




Indhold:

- 10 x hætteglas a' 5 ml
- 10 x transparente engangs pipetter
- Til 10 behandlinger

Varenr.:

MST101



Hydrolyseret kollagen fornyer vævet

Hydrolyseret kollagen er kollagen, hvor de molekulære bindinger mellem de enkelte kollagentråde er blevet nedbrudt ved hjælp af kemisk eller enzymatisk behandling. Forskning viser, at elastins og kollagens gode egenskaber skyldes deres sammensætning af aminosyrerne glycin, valin, prolin og hydroxyprolin. En behandling med MESO STRETCH MARK REMOVER gør det lettere for kroppen at absorbere den hydrolyserede kollagen. Hydrolyseret kollagen består af de vandopløselige signalstoffer, peptider, der er rige kilder til aminosyrerne glycin, L-prolin og L-hydroxyprolin. Processen stimulerer sårheling, styrker produktionen af væv og hjælper med at opbygge kollagenmatrixen.

Reducer strækmærker effektivt og uden bivirkning

Ud over at kunne reducere og forebygge strækmærker har MESO STRETCH MARK REMOVER vist sig at have antiinflammatoriske egenskaber, og behandlingen reducerer desuden rødhed med 13 %.

Behandlingen er effektiv, men skånsom, og der er ingen alvorlige negative bivirkninger forbundet med brug af hydrolyseret kollagenprotein.



MESO STRETCH MARK REMOVER

stimulates wound healing and tissue regeneration

Reducer strækmærker med MESO STRETCH MARK REMOVER

Regenerer huden og reducerer strækmærker (både hvide og røde).

Både mænd og kvinder kan opleve fremkomst af strækmærker forskellige steder på kroppen.

Strækmærkerne opstår, når huden strækkes ud eller trækkes sammen for hurtigt, f.eks. i forbindelse med graviditet, vægtøgning, vægttab eller muskelopbygning. Overbelastningen af huden ødelægger det subdermale kollagen, ligesom det skader og dehydrerer elastin-fibermatrixen. Det kan efterlade de synlige mærker eller ar, vi kender som strækmærker.

En behandling med MESO STRETCH MARK REMOVER kan forhindre og reducerer strækmærker. MESO STRETCH MARK REMOVER indeholder aktive ingredienser, der ifølge kliniske undersøgelser kan forebygge og reducerer strækmærker ved at øge kollagen- og elastindannelsen, stramme kollagenmatrixen og hydrere bestemte områder af huden målrettet.

Stimulerer hudens egen produktion af kollagen

Proteinet kollagen udgør ca. 25 % af protein sammensætningen i menneskekroppen, og det er kollagen, der giver vores hud et sundt og spændstigt udseende ved at skabe elasticitet og erstatte de døde hudceller. Hudens produktion af kollagen falder med alderen, og det svækker hudens spændstighed, medvirker til slaphed i huden, og til at vi udvikler fine linjer ved øjnene og rynker i panden, når vi bliver ældre. MESO STRETCH MARK REMOVER-behandlingen kan reducere strækmærker ved at stimulere hudens egen genopbygning og øge produktionen af kollagen.

MESO STRETCH MARK REMOVER bruger hudens egen genopbygning til at reducere strækmærker

MESO STRECHMARK REMOVER forynger og styrker huden indefra og kan derfor effektivt både forebygge og reducere strækmærker. Behandlingen optimerer produktionen af elastin og kollagen ved at sikre de to proteiners permanente biotilgængelighed. Gennem påvirkningen af lysyl oxidase-enzymene øges netværket mellem fibre, og silicium hjælper med at strukturere og samle fibre i et velorganiseret tredimensionelt netværk.

Chondroitinsulfat er et vigtigt glycosaminoglycan, og selvom det kun optræder i små mængder i den ekstracellulære matrix, har det alligevel stor betydning for hudens tilstand.

Chondroitinsulfat er afgørende for den todelte proces, hvor hudens hydrering vedligeholdes, samtidig med at produktionen af hyaluronsyre øges. Hyaluronsyre binder vand i huden og er med til at gøre den fyldig og give den et sundt og friskt udseende.

Primære aktive ingredienser (15 i alt)

Aqua distil, Aqua mar. Isot, Sodium Chondroitin Sulfate, hydrolyzed Collagen, Sodium Mannuronate Methylsilanol, Glucosamine Sulfate, Sodium Metabisulfite. Kollagen er et protein, der udgør ca. 25% af proteinet i menneskekroppen. Kollagen er til stede i normal hud. Erstatte døde hudceller med nye.

Da vi alder, bliver vores forsyning af kollagen mindsket eller nedbrudt. Dette fører til at vi får smile rynker, alm. rynker og andre folder i huden. Hydrolyseret kollagen, HCP, (også kendt som rensset gelatine og kollagenhydrolysat) er kollagen, der er blevet enzymatisk eller kemisk behandlet for at gøre det lettere at absorbere af kroppen. Kollagen er det primære strukturelle protein, der findes i bindevæv i kroppen.

MESO STRETCH MARK REMOVER

stimulates wound healing
and tissue regeneration

Primære behandlingsområder

- Krop
- Bruges på strækmærker og områder omkring strækmærker

Behandling afhjælper

- Reducerer markant hvide og røde strækmærker
- Der er ingen kendte bivirkninger ved indtagelse af hydrolyseret kollagenprotein.

Tip og behandlingsfrekvens

- Ti gange hver 10. dag
- Ideel til forebyggelse af strækmærker ved graviditet eller ved vægttab



Indhold:

- 10 x hætteglas a' 5 ml
- 10 x transparente engangs pipetter
- Til 10 behandlinger

Varenr.:

MST103



MESO SKIN PERFECTOR

Et revolutionerende BB Glow Produkt

MESO SKIN PERFECTOR er en revolutionerende, ultra fugtgivende hudplejebehandling, der har en synlig lysende effekt og efterlader huden med masser af glød.

Det er en sikker og non-invasiv intensiv behandling, der giver en jævn hudtone, kamuflerer hudens ujævnheder, fregner, små rynker og udjævner i nogle tilfælde endda pigmentpletter (melasma) samt har en stærk anti-age virkning takket vitaminer C, E og kollagen.

MESO SKIN PERFECTOR er en concealer behandling, der effektivt reducerer misfarvning af huden i ansigtet og giver en ensartet teint. Behandlingen er velegnet til bekæmpelse og kamuflering af uren hud, aldring af huden, rynker, træt og kedelig teint, synlige porer, poser og mørke rande under øjnene, ar, fregner og pigmentpletter.

MESO SKIN PERFECTOR behandlingen hjælper med at reducere fregner og lysner huden. Den er også med til at bekæmpe misfarvning af huden forårsaget af akne og aldersbetingede hudforandringer (ældningspletter).

MESO SKIN PERFECTOR giver ikke blot en mere ensartet hudtone, men behandler også huden indefra - det er en effektiv anti-age og antioxidant mesoterapi-cocktail til behandling af dehydreret hud med tegn på aldring og manglende elasticitet.

Giver varige resultater i op til 4 måneder, efter fortsat behandling 4-5 gange, velegnet til ALLE hudtyper!

MESO SKIN PERFECTOR LIGHT

Anbefales til personer med en meget lys hudfarve / hudfarve. Denne hud perfector bruges til at reducere fregner og farveændringer forårsaget af urenheder og aldring.

Brug denne tone som en highlighter til en BB GLOW ansigtsskulpturering.

MESO SKIN PERFECTOR Natural

En medium beige tone med lyserøde undertoner, ideel til mennesker med en varm hudfarve / hudfarve.

Brug denne skygge til at udglatte og fremhæve en afbalanceret hudfarve i bleg hud, der har tendens til at virke misfarvet.

MESO SKIN PERFECTOR Medium

Ideel til garvet hud eller mennesker med en mere bronzefarvet hudfarve.

Vi anbefaler det til folk med en mørkere hudfarve. Denne tone er en mørkere kontur til MESO ansigtsskulpturering

MESO SKIN PERFECTOR

Et revolutionerende
BB Glow Produkt

Primære behandlingsområder:

- Ansigt
- Krop
- Hænder

Vorteile der Behandling:

- Skaber ensartet og glansfuld hud
- Giver en blød og glat hudstruktur
- Reducerer fine linjer og rynker
- Giver huden glød og tilføjer den langtidsvirkende fugt
- Bekæmper aldringstegn
- Glattende effekt takket kollagen tilførsel
- Får porerne til at syne mindre
- Opstrammende effekt takket vitamin E
- Detoxende virkning
- Har en øjeblikkelig* og gradvist lysnende effekt
- Er yderst velegnet til asiatisk, lys og etnisk hud
- Genopretter og giver jævn hudtone mindst op til 4 måneder
- Øger kollagenproduktionen
- Neutraliserer frie radikaler
- Reducerer misfarvet hud
- Lysner misfarvninger efter akne (PIH)
- Skjuler mørke rande under øjnene

TIP:

Brug enten en enkelt tone over hele behandlingsområdet eller kombiner forskellige toner.



Indhold:

- 5 x 6 ml hætteglas: LIGHT: til lyse hudtoner
- 5 x transparente pipetter
- Til 5 behandlinger

varenr.:

| | |
|-------------|--------|
| Starter Kit | MST112 |
| Light | MST113 |
| Natural | MST115 |
| Medium | MST114 |



MESO PEEL KITS

Perfection in skin rejuvenation - against signs of skin damage

Forklaring af de anvendte ingredienser i MESO PEEL Acne og MESO PEEL Melanin

PYRODRUESYRE 20% | PYRODRUESYRE 20%

Bemærk: indeholdt som en aktiv ingrediens i MESO PEEL Acne og MESO PEEL Melanin

0% pyruvinsyre er meget effektiv til at reducere melasmer og misfarvning af huden efter betændelse. Det spiller en vigtig rolle i depigmentering og er aktiv mod (hæmmer) keratinocytter.

Det har også antibakteriel, antiinflammatorisk og sebumregulerende egenskaber. Pyruvinsyre er en effektiv chelerende kobberforbindelse, der styrker tyrosinase-enzymerne og har en depigmenterende virkning.

SALICYLSYRE 20% | Funktion: aktivt stof

Bemærk: indeholdt som en aktiv ingrediens i MESO PEEL Acne
Salicylsyre er en let hydrofil syre, der har talgregulerende egenskaber.

Det har også antiinflammatorisk, antimikrobiel, astringent og anti-aging egenskaber.

Resorcinol er et fenolisk derivat med keratolytiske og regenererende egenskaber, bekæmper misfarvning af huden og har en lysende virkning. Effektiv. Resorcinol bruges i acne- og hudbehandlingsprodukter til at fjerne hård, flassende eller ru hud. Har keratoplastisk, antiseptisk og let kaustiske egenskaber.

Resorcinol virker ved at nedbryde ru, flassende eller hærdet hud. Resorcinol desinficerer Hud også til at bekæmpe infektioner.

RESORCINOL 10% | Funktion: aktivt stof

Bemærk: indeholdt som en aktiv ingrediens i MESO PEEL melanin

FYTINSYRE 6%

Phytinsyre er en kraftig chelaterende forbindelse med kobber, der stimulerer tyrosinaseenzymerne og har en depigmenterende virkning.

Aktive ingredienser

MESO PEEL Protector

- CERA ALBA (bivoks)

MESO PEEL Stop

- BISABOLOL: (2-6 %) -> stimulerer kollagensyntese
- Aloe Barbadosis bladjuice -> har en beroligende og afkølede effekt
- NATRIUMIKARBONAT

MESO PEEL Acne

- PYRODRUESYRE (20%)
- SALICYLSYRE (20%)

MESO PEEL Melanin

- PYRODRUESYRE (20%)
- RESORCINOL (10%)
- FYTINSYRE (6%)

Meso Peel Acne varenr.: MST116

Meso Peel Melanin varenr.: MST117

MESO PEEL ACNE Perfektion i hudforyngelse

Fordele ved behandlingen:

- reducerer melasmer og misfarvning af hud efter betændelse
- hæmmer keratinocytter
- antibakteriel, antiinflammatorisk og regulering af talg egenskaber
- bekæmper misfarvning af hud
- har en lysende virkning



Meso Peel Melanin® Anti-fotoaging og hyperpigmentering egenskaber

Fordele ved behandlingen:

- reducerer melasmer og misfarvning af hud efter betændelse
- hæmmer keratinocytter
- antibakteriel, antiinflammatorisk og sebumregulerende egenskaber
- reducerer hård, skællende eller ru hud
- desinficerer huden for at forhindre infektioner



Indhold Meso Peel Melanin Kit:

- 1 x 10 ml MESO PEEL Protector
- 1 x 50 ml MESO PEEL Acne or Melanin (pH 3.5)
- 1 x 25 ml MESO PEEL Stop (pH 8.6)
- Til 25-30 behandlinger



Cosmeceuticals

Functional and adjuvant in outpatient treatment



MESO PURE PEEL

different actions in one treatment

Side 21

MESO ANTI-AGE MASK

professional Patch Hydrogel face mask

Side 23

MESO LIFT AND PROTECT

very high sun protection with anti-age effect

Side 25

MESO PIGMENT REDUCE


optic effect

Side 27

MESO PAIN REDUCE

reduces the pain

Side 28

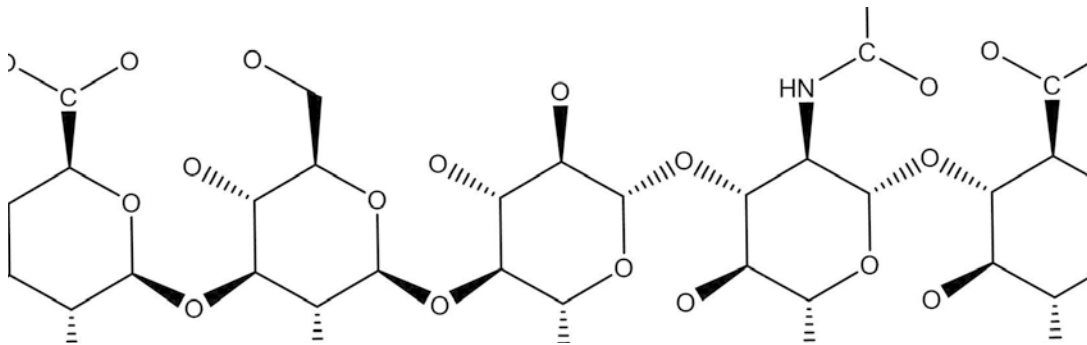

mesoskinline[®]



MESO PURE PEEL

different actions in one treatment

MESO PURE PEEL

MESO PURE PEEL (PH=4,3) er den unikke peeling i engangsdispenser á 3 ml med naturlige ingredienser, der reducerer peeling-bivirkninger.

MESO PURE PEEL er et fremragende produkt til naturlig og effektiv peeling. Perfekt til en dyb corneolysis-rensning før enhver behandling.

MESO PURE PEEL er et koncentrat af 5 vegetabiliske ekstrakter

- Blåbær
- Sukkerrør
- Ahornsukker
- Appelsin
- Citron

MESO PURE PEEL 5 behandlinger i en:

- Keratolytic
- Collagen Syntese
- Elastinsyntese
- Fugtgivende
- Ingen rødme eller ubehag.

MESO PURE PEEL lever op til standarderne for økologi og økologisk kosmetik ifølge ECOCERT (www.ecocert.com).

Alfa hydroxy-syrer har vist sig at fremme en glattere og yngre hud ved at øge cellefornyelsen.

Primære aktive ingredienser (21 i alt)

- Lactic Acid 28-32% - Virkelig fugtighedsgivende
- Glycolic Acid 12-17% - Effektiv Keratolytisk Effekt
- Citric Acid 2-6% - Stimulerer Collagensyntesen
- Malic Acid 1% maks. - Øger hudens elasticitet
- Tartaric Acid 1% maks. - Fremmer hudens stramhed

MESO PURE PEEL

different actions
in one treatment

Primære behandlingsområder

- Ansigt. Skal påføres før enhver anden dermatologisk behandling: phototerapi, laser, needling, RF, og andre kosmetiske metoder
- Krop

Behandling afhjælper


- Renser med en kraftig corneolysis-virkning
- Fremmer cellefornyelsen
- Maksimal effektivitet med minimal irritation, fremmer en strålende hud
- Anti-aging
- Dyb corneolysis
- Gør huden modtagelig for aktive ingredienser

Tip og behandlingsfrekvens

- Kan benyttes som kurforløb i 14 dage inden sengetid, under natcreme.
- Kan bruges inden solferie til forberedelse af huden til jævn melanin produktion.
- Gnid det jævnt ud i cirkulære bevægelser på behandlingsområdet, indtil det er absorberet. Skyl ikke i de næste 8-12 timer.

Peeling

The first one in monouse wipe

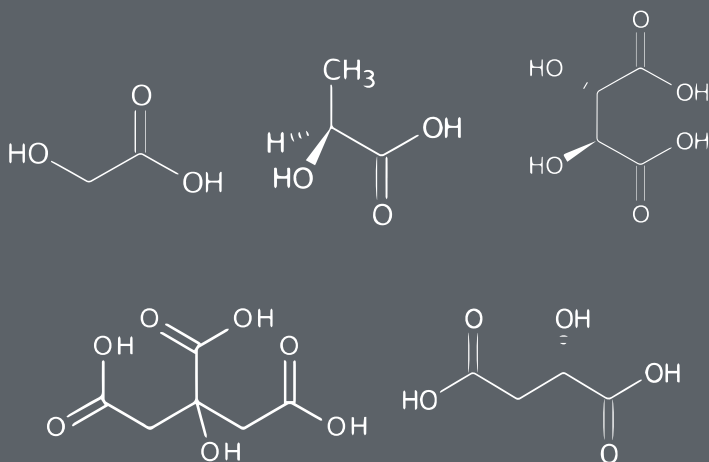

Indhold:

Dispenser med 1 x 24 engangsbreve á 3,5 mL.

Varenr.:

MST111



MESO ANTI-AGE MASK

professional Patch Hydrogel face mask

MESO ANTI-AGE MASK

mesoskinline's MESO ANTI-AGE MASKE består af et dobbelt lag. Det første lag er sammensat af et tykt celluloselag, mens det andet lag er i hydrogel.

Begge er lavet for at sikre en effektiv osmotisk proces, der muliggør en høj overføringseffektivitet af aktive ingredienser (farmaceutisk kvalitet) til stede i hydrogelfilmen.

For at skabe de ideelle forhold, der kan stimulere den osmotiske proces, har huden brug for en præcis kompression gennem en tyk forbindelse, som samtidig skal være fleksibel og elastisk for at passe præcis formen på det område, der skal behandles (af denne årsag er tnt ikke et idonisk materiale til stimulering af den osmotiske proces).

Dette er den største forskel mellem en professionel maske og masker til homecare.

Masken forøger hudens regenereringskapacitet på grund af den høje procentdel af hyaluronsyre, hvilket giver en blødere og naturlig virkning med det samme.

MESO ANTI-AGE MASK indeholder en innovativ formel af naturlige ingredienser. Hovedingredienserne er: Acetyl Hexapeptid-8 Argireline®, HA 25%, Retinol og Resveratrol.

MESO ANTI-AGE MASK reducerer dybden af ansigtsrynker, der forårsages af sammentrækninger i musklerne under forskellige ansigtsudtryk, specielt rundt om øjnene, munden og panden.

Den afgifter huden og har gode antioxidante egenskaber (vitamin A, C og E). Grundet den høje procentdel af hyaluronsyre, gendannes det fysiologiske hydro lipid niveau fra første gang.

En række testbehandlinger på flere personer har bevist en markant anti-age and lifting effekt.

Primære aktive ingredienser (21 i alt)

Kollagen, Sillicium, Marine plasma, Taurine, Hyaluronsyre, Acetyl Hexapeptid-8 Argireline®, HA 25%, Resveratrol, Hexyl cinnamal., Aqua (Water), Algin Polyvinyl Alcohol, Cellulose Gum, Propylene Glycol, Sodium Hyaluronate Retinyl Palmitate, Parfum, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylphenyl Methylpropional, Alpha-Methyl ionone, Benzyl salicylate, Coumarin, Eugenol, Geraniol.



MESO ANTI-AGE MASK- professional Patch Hydrogel face mask

Primære behandlingsområder

- Ansigt
- Hals

Virkning

- Anti-age
- Post mesoterapi
- Post-laser
- Post-peeling
- Opstrammende virkning
- Mindsker rynker omkring øjnene, ved munden og på panden
- Fugtighedsgivende
- Fasthed
- Hudens glathed

Tip og behandlingsfrekvens

- Læg masken på ansigtet og halsen i op til 40 minutter efter behandlinger



Indhold:

Æske med 10 masker

Varenr.:

MST107

SYN[®]-AKE

SYN[®]-AKE er baseret på en patenteret mekanisme. Den efterligner sekvensen af de essentielle aminosyrer i forbindelse med waglerin-1-funktionen. SYN[®]-AKE's sikkerhed og aktivitet er testet grundigt.

Dens virkning fokuserer på en omgående og vedvarende afslapning af efterlignende rynker ved at blokere neurontransmissionen i nikotin-acetylcholin-receptoren. Peptidet er en antagonist til membranen af muskulære nikotinacetylcholin-receptorer (mnAChR). Siden de muskulære nikotin-ACH-receptorer er blokeret, forbliver ionkanalen lukket. Der er ingen absorption af Na⁺, og muskelcellerne forbliver afslappede. Transmissionen af nerveimpulser til musklerne er hæmmet, og ansigtsmusklerne er afslappede.

Effektiviteten af SYN[®]-AKE tripeptid (0,5 mM) er bevist in vitro ved at måle kontraktionsfrekvensen af de pågældende muskelceller som en funktion i inkubationstiden.

MESO LIFT AND PROTECT

very high sun protection with anti-age effect

Dagcreme med utrolig høj solbeskyttelse

MESO LIFT AND PROTECT er en dagcreme med solbeskyttelse. Den er ideel til følsom hud, fotodermatose (solallergi), lysfølsomhed forårsaget af visse lægemidler, pigmentpletter, for tidlig aldring af huden og immunologiske forandringer. Hjælper med at forebygge dermatologiske lidelser som følge af ekstrem udsættelse for UVB- og UVA-stråler (SPF 50+), inklusive solallergi, pletter, elastose, for tidlig aldring og konsekvenser af den akkumulerede effekt af strålinger af huden.

Tolerancen og effektiviteten af MESO LIFT AND PROTECT er testet under dermatologiske kontroller.

MESO LIFT AND PROTECT er et multifunktionelt produkt. Ud over tilstedeværelsen af effektiv solbeskyttelse mod UVB- og UVA-stråler er formlen beriget med værdifulde aktive ingredienser, der er egnet til at garantere:

- Beskyttelse mod UV stråler
- Fugtighedsgivende
- Lindrende
- ALOE VERA

Den berømte Aloe Vera eller Aloe barbadensis er videnskabeligt testet på alle former for forbrændinger, uanset om det er stråler, termiske eller fra solen. Den har også vist sig at have en forebyggende effekt, når den anvendes før, under og efter disse hudskader. Mange af fordelene ved AV kan associeres med polysacchariderne, der findes i geleen fra bladene. Men flere andre naturlige kemiske stoffer i Aloe Vera-ekstrakt er associeret med nyttige sundhedsfremmende virkninger: Aminosyrer, anthraquinoner, enzymer, organiske og uorganiske stoffer, fedtstoffer, kulhydrater, lignin, salisytsyre, saponiner, steroler og vitaminer (B1, B2, B6, C, B-karoten, cholin, folsyre og A-tocopherol).

HA lavmolekylær vægt (5-10 kDa)

Hyaluronsyre og mere generelt mucopolysaccharider, er blandt de primære bestanddele i bindevævsstrukturerne. Hyaluronsyrens utroligt lave molekylvægt (5-10 kDa) i MESO LIFT AND PROTECT forbedrer den intrakutane penetrering og danner et nyt råmateriale til dannelse af en medium molekylvægt af hyaluronsyre. Denne form for hyaluronsyre er især egnet til at tilbageholde vand, både i bindevævet og i det dybere lag af huden (og er derfor ansvarlig for en dybdegående hydrering). I de øverste lag af huden reduceres det transepidermale væsketab (TEWL).

Colloidal oatmeal

Colloidal oatmeal er blevet anvendt i tusindvis af år til behandling af hudlidelser. Colloidal oatmeal er populært for sine fugtighedsgivende, rensende, antioxidante og antiinflammatoriske egenskaber, som skyldes den kemiske heterogenitet. Det er bevist, at oatmeal-ekstrakt hæmmer aktiviteten af nuklearfaktoren Kappa B (NF-kappa B) i keratinocytter og frigivelsen af proinflammatorisk histamin af cytokiner. Det frembringer også arakidonsyre, den cytosoliske fosfolipase A2 og tumornekrose faktor-alpha (TNF-alpha). Colloidal oatmeal har vist sig at være en sikker og effektiv ingrediens i forskellige produkter til personlig pleje. Det indeholder en række aktive bestanddele, inklusive polysaccharider, proteiner, lipider, saponiner, enzymer, flavonider, vitaminer og avenantramider (polyfenoler).

Primære aktive ingredienser

PF 50+, Syn®-ake, Hyalluron-syre, Oat, Aloe

MESO LIFT AND PROTECT

anti-age day cream
with very high sun protection

Primære behandlingsområder

- Ansigt
- Krop
- Hænder

Virkning

- Solblok med 3 virkninger
- Anti-age
- Beskyttelse mod UVB og UVA stråler
- Fugtighedsgivende
- Lindrende
- Reducering af rynker
- ALOE VERA (Beroligende effekt)

Tip

MESO LIFT AND PROTECT kan blandes med foundation for at opnå effekt af BB creme i den mest passende farve.



Indhold:

Æske = 1 x lufttom flaske á 50 mL

Varenr.:

MST110



MESO PIGMENT REDUCE

optic effect

Melanogenese og usund hudfarve

Hudens farve er resultatet af tilstedeværelsen af forskellige pigmenter.

Hæmoglobin i de røde blodceller, karoten som primært findes i adipocytterne. Det pigment, der påvirker hudens farve mest, er melanin, som produceres af specialiserede celler i epidermis og hedder melanocytter. Melanin regulerer hudens farve via en kompleks mekanisme. Usund hudfarve er ændringer i hudens farve forårsaget af for meget melanin eller i nogle tilfælde aflejring af andre pigmenter i epidermis. Denne ændring kan være på specifikke områder af kroppen eller mere udbredt. Misfarvningerne eller pletterne på huden er ikke alle sammen ens. Hver af dem har forskellig oprindelse og dybde.

Hvad er nøgleingredienserne i MESO PIGMENT REDUCE?

Glabridin: Er et isoflavonid, der udvindes og isoleres fra *Glycyrrhiza glabra* L.-roden. In vitro- og in vivo-undersøgelser har vist, at dette phytoestrogen indeholder en række egenskaber: antioxidant, anti-inflammatorisk, neurobeskyttende, antitumorogent, antibakteriel og depigmenterende, når det påføres på huden. Den depigmenterende aktivitet af glabridin skyldes en multifunktionel virkning på de årsager, der medfører manifestationen af en usund hudfarve.

Vitamin C: Askorbinsyre, et næsten ubikvitært molekyle af natur, er til stede i mange citrusfrugter og grønbladede grøntsager og reducerer melaninproduktionen, idet det er i stand til at reducere o-DOPACHINON til det tidligere stof, DOPA, for forstyrrer oxidationsprocessen som medfører dannelsen af melanin. Dette viser sig rent faktisk at være mere stabilt i forhold til oxidering og forbedrer dermed produktets virkning.

Arbutin: Et naturligt glucosid af Hydroquinone, kemisk kendt som Hydroquinone- β -D-Glucopiranosid, virkningsmekanismen, derimod synes anderledes, siden kliniske undersøgelser af dyrkning af humane melanocytter åbner for muligheden for, at det ikke reagerer på en syntese eller på enzymudtryk. Kliniske undersøgelser har bekræftet at dets påføring ikke giver nogle bivirkninger i modsætning til hydroquinoner.

Kojicsyre: Hæmmer enzymet tyrosinase, chelaterer kobber i det aktive område. Kliniske undersøgelser har vist, at kojicsyre og dets estere har depigmenterende egenskaber og betragtes som sikkert og ikke giftigt. Den hæmmende effekt på melanindannelsen skyldes både den hæmmende aktivitet af transkriptionsfaktoren, der associeres med microphthalmia (MITF), og hæmningen af den hormonstimulerende alpha-melanocyt aktivitet (alpha-MSH).

Azelainsyre: De afblegende egenskaber af azelainsyre skyldes den konkurrenceprægede tyrosinhæmmende virkning.

Niacinamid: Er det biologisk aktive amid af vitamin B3. Undersøgelser har vist, at niacinamid sammen med en passende solbeskyttelse kan give en bedre klarhed sammenlignet med brugen af solbeskyttelse alene.

Vitamin A: Retinoidsyre virker også depigmenterende og kan give en lysnende effekt, når den påføres huden. Virkningsmekanismen, som dog ikke er fuldstændig afklaret, er på den ene side forbundet med en øget celleudskiftning af keratinocytter og faciliterer dermed pigmenttab fra epidermis. På den anden side giver den en indirekte styrkelse af den cytotoxiske effekt på melanocytter ved nogle huddepigmenteringer ved hæmning af afgiftningsveje (med en relativ stigning i giftige stoffer såsom quinoner).

Pueraria (Kudzu): Roden og blomsten, som anvendes inden for traditionel medicin, har forskellige medicinske egenskaber. Utallige undersøgelser har vist aktiviteten af dette planteekstrakt i forhold til Melanogenese. Aktiviteten i forhold til at undertrykke Melanogenese er bekræftet visuelt ved farvningen af fontana-masson.

Brassica Napus Frø Ekstrakt: Rig på antioxidant. In vitro- og in vivo-undersøgelser har vist, at den aktive ingrediens er i stand til at reagere på aldringstegn, reducere misfarvning af huden og en ensartet hudfarve.

MESO PIGMENT REDUCE

optic effect

Primære behandlingsområder

Meso Pigment Reduce hjælper med at reducere og forebygge pigmentforandringer og pletter i ansigtet, på kroppen og på hænderne. Det giver den mest intense, effektive og innovative behandling af hyperpigmentering, melasma, solskader, alder pletter, misfarvning og mørke cirkler.

Virkning

- Hurtig blegningseffekt
- Hyperpigmenteringer
- Aldringspletter
- Mørke cirkler ved øjnene

Formlen indeholder mange stærkt koncentrerede aktive ingredienser med stærkt depigmenterende egenskaber.

Tip og behandlingsfrekvens

Påfør produktet to gange dagligt direkte på det pågældende område. Produktet virker allerede efter de første påføringer.



Indhold:

Æske = 1 x lufttom flaske á 30 mL

Varenr.:

MST108



MESO PAIN REDUCE

desensitising the skin

MESO PAIN REDUCE

MESO PAIN REDUCE er et desensibiliseringsmiddel til topisk anvendelse baseret på Eugenol, og specielt udvundet fra nellikeolie som har antiseptiske og antibakterielle egenskaber men vigtigst af alt, bedøvende egenskaber.

MESO PAIN REDUCE anvendes som et topisk bedøvelsesmiddel før en æstetisk behandling, såsom filler, mesoterapi, laser, needling og andre behandlinger der kan være smertefulde for patienten.

Dets sammensætning giver et lokal topisk sensorisk chok med omgående virkning der virker i omkring 10 minutter. Nok tid til at foretage behandlingen.

Det hurtigvirkende effekt gør at det kan påføres igen hvis nødvendigt, så behandleren kan fortsætte behandlingen uden arbejdsafbrydelser.



Bivirkninger

Ingen rapporteret.

Aktive ingredienser

Eugenol (specielt udvundet fra nellikeolie), Kamfer, Capsaicin

INDEHOLDER IKKE: Lidokain, Tetracain, Adrenalin

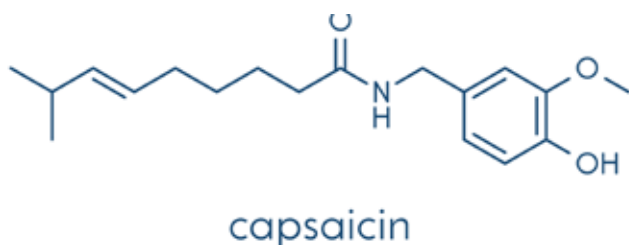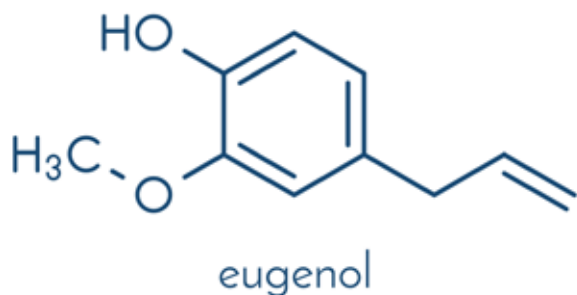

MESO PAIN REDUCE

desensitising the skin

Primære behandlingsområder

- Ansigt
- Krop

Behandling afhjælper

- Anvendes som et topisk bedøvelsesmiddel før en æstetisk behandling, såsom filler, mesoterapi, laser, needling og andre behandlinger der kan være smertefulde for patienten.
- Smertestillende / Bedøvende
- Antibakteriel virkning

Tip og behandlingsfrekvens

Gennem den specielle dyse, påfør en eller flere baner af ca. 1 cm (udover behandlingsområdet) med en fugtig klud.

Masser blidt. Skyl ikke før efter behandlingen.




Indhold:

Æske = 1 x lufttom flaske á 50 mL


Varenr.:

MST100

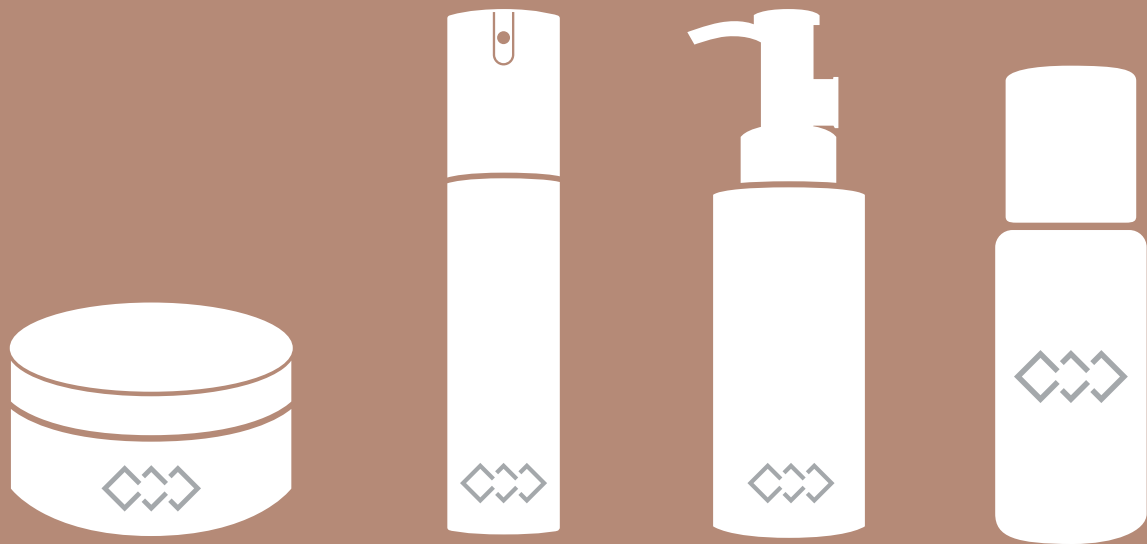

Homecare Produkter fra **mesoskinline**

EKSKLUSIVE FORMLER OG DERMATOLOGISK TESTEDE HOMECARE PRODUKTER

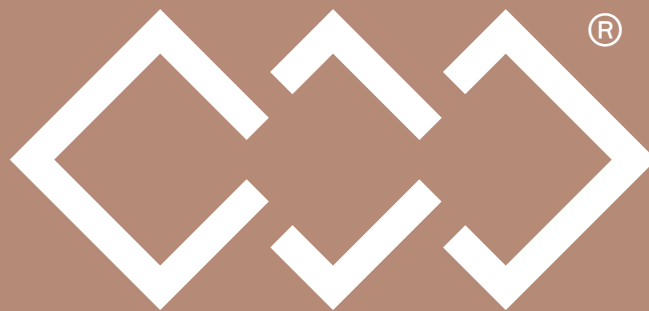

www.mesoskinline.com

MESO 3D EYE CREAM

Ultimativ øjenpleje

Side 36 - 37

MESO BALANCING CLEANSER

Fjerner makeup uden at irritere huden

Side 38 - 39

MESO RETINOL DREAM

Effektiv mod rynker og hængende hud

Side 40 - 41



Banebrydende videnskabelig forskning og udvikling

mesoskinline



Meso 3D EYE CREAM

Intensive treatment for the eye contour

MESO 3D EYE CREAM Meso 3D Eye Cream er en creme til intensiv behandling af området omkring øjnene. Øjenlåget løftes, området omkring øjnene udglattes og lysnes, strukturen ændres og gør øjenkonturerne mere afstemte og faste.

Den specifikke sammensætning indvirker på de væsentligste årsager til poser og mørke rande under øjnene og stimulerer mikrocirkulationen i huden, fremmer eliminering af blodafledt pigmentering og hjælper med at forebygge tegn på periokulær ældning af huden.

Meso 3D Eye Cream contains a compilation of active ingredients consisting of triterpene saponins - (Escin) of Aesculus Hippocastanum and lecithin, enriched with an anti-bags' and anti-dark circles' plant complex based on silk tree extract.

Komplekset aktiverer den periokulære mikrocirkulation og understøtter reabsorption af hemoderivative pigmenter, der forårsager mørke rande under øjnene.

Produktet modvirker ru hud og forbedrer den periokulære hudtone ved at stimulere regenereringen af de strukturelle komponenter, hvormed et fornyet, strålende look reetableres.

Det giver lys og vitalitet til øjenkonturen, reducerer oxidation og aktiverer.

HOVEDINGREDIENSER

ESCIN

Kompleks af triterpene saponins (escin) fra Aesculus hippocastanum og lecithin, med beroligende, nærende og vænetoniske egenskaber.

Det er med til øge blodcirkulationen, forbedrer den kapilære hudtone, mindsker kapilær permeabilitet og dermed blodårenes skrøbelighed.

Det har en drænende virkning, der reducerer poser under øjnene, og stimulerer mikrocirkulationen, hvormed mørke rande reduceres.

Ekstrakt fra Albizia julibrissin (albizzia) og Darutoside:

Beskytter, styrker og forbedrer egenskaberne ved dermis.

Det styrker det mikrovaskulære net og stimulerer afgiftning, hvorved kapilær permeabilitet og akkumulering af glykotoksiske pigmenter, der er ansvarlige for uensartet teint og et træet udtryk, mindskes, hvilket har en løftende effekt på hængende øjenlåg.

Hyaluronsyre:

Takket være produktets ekstraordinære evne til at binde og lagre store mængder vand mellem cellerne er det essentielt for optimal hydrering af hudens væv.

Det er også værdifuldt, da det virker på både overfladen ved at løfte overhuden og mere i dybden ved at stimulere den cellulære omsætning af vævet. Dermed bekæmpes hudens ældning og dannelsen af rynker, så huden forbliver kompakt, elastisk og glat.

MESO 3D EYE CREAM

Intensiv behandling af øjenkonturen

Fordelene:

- Huden fugtes og bliver mere elastisk
- Hjælper med at mindske linjer omkring øjnene
- Mindsker poser under øjnene og mørke rande
- Stimulerer kollagensyntese
- Har en øjeblikkelig udglattende effekt

Ingredienser:

- Vand
- Glycerin
- Propylenglycol, lecithin
- Natriumakrylat, CI77891
- Phenoxyetanol
- Ekstrakt af bark fra Albizia julibrissin
- Ekstrakt fra Centella asiatica
- Ekstrakt fra Aesculus hippocastanum-frø
- Tocopherylacetat
- Darutoside
- Hyaluronsyre
- Diglycerin
- Escin
- Panthenol
- Ethylhexylglycerin
- Triethoxycaprylsilan
- Ekstrakt fra Pinus pinaster



Indhold:

Æske = 1 lufttæt 30 ml flaske

Varenr.

MST130



MESO BALANCING CLEANSER

Idel til at fjerne alle spor af makeup

MESO BALANCING CLEANSER

Er en afbalanceret gel til fjernelse af makeup. Den har en dybderensende virkning uden at udtørre eller irritere huden, så huden efterlades strålende, fugtmættet og ekstremt blød.

Formlen, der er beriget med vegetabiliske olier, udvalgt for deres indhold af fedtsyrer, nærer i dybden, hvilket øger hudens elasticitet, giver en mere blød hud og mindsker rødme. Gelen er særligt velegnet til følsom hud, da den fjerner makeuprester fra ansigt og øjne uden at svie.

Daglig brug sikrer hudens fysiologiske hydrering, hvilket giver en øjeblikkelig behagelig fornemmelse.

MAIN INGREDIENTS

Mandelolie:

Gelen er blandt de produkter med det forholdsvist højeste indhold af umættede og flerumættede fedtstoffer, som udgør gelens blødgørende og plejende egenskaber og gavner huden.

Takket være de nærende egenskaber opretholdes hudens naturlige fugt-fedt-balance, hvilket bidrager til fornyelsen af cellevæv

Olivenolie:

Olivenolien er en kraftigt virkende antioxidant. Den beskytter mod de skadelige virkninger fra frie radikaler og har en udglattende effekt.

Der er tale om en rig, blødgørende olie, der nærer huden i dybden og regulerer dens naturlige hydrering. Den har også en beroligende virkning på rødme og irritation og kan bruges på selv meget følsom hud.

Borage Seed Oil:

Hjulkroneolie er den mest righoldige vegetabiliske kilde til gammalinolensyre, en flerumættet fedtsyre, som er meget gavnlig for hudens elasticitet, fylde og ungdommelighed.

Oliens genopbyggende effekt tilfører huden fugt, har en udglattende virkning og øger hudens beskyttende egenskaber, samtidig med at betændelsestilstande bekæmpes.

Hørfrøolie:

Hørfrøolie er rig på essentielle fedtsyrer fra omega-3, -6 og -9, de såkaldte „sunde fedtstoffer“ og betragtes som en af de mest fortrinlige præparater mod ældning af huden.

Indholdet af linolsyre har en elastisk effekt og hjælper huden med at genvinde fugt og blødhed. Dens antioxidant effekt nærer huden og fremmer iltning af cellerne og deres naturlige fornyelse.



MESO BALANCING CLEANSER

Ideel til at fjerne alle spor af makeup

Fordelene:

- Refreshing Cleanser
- Makeup Remover
- Toner

Ingredienser:

- Vand
- Glycerin
- PEG-40 hærdet ricinusolie
- Dinatriumcocoamphodiacetat
- Akrylater/C10-30 alkylacrylat-krydspolymerer
- Frugtolie fra Olea europea (oliven)
- Olie fra Prunus amygdalus dulcis (mandler)
- Olie fra Linum usitatissimum (hør)
- Natriumklorid
- Natriumlauroylsarcosinat
- Cocamidopropyl-trimetylglycin
- Ammoniumlaurilsulfa
- Olie fra Borago officinalis
- Kaliumsorbit
- Natriumbenzoat
- Parfume, dinatrium-EDTA
- Tocopheroler
- Natriumhydroxid
- CI 42051
- CI 44090.



Contents:

1 Box = 150 ml bottle

Varenr.

MST132



MESO RETINOL DREAM

Opstrammer og gendanner hudens volumen og struktur

MESO RETINOL DREAM

Meso Retinol Dream er en creme med kraftigt virkende ingredienser, der er med til at korrigere og forebygge de væsentligste tegn på aldring.

Den har en synergieffekt på hudens overflade og virker i dybden, takket være den kombinerede virkning af aktive ingredienser som retinol, alfaliponsyre og yderst effektive antioxidante vitaminkomplekser, der modvirker rynker og fremmer udglatning af huden

It helps to reduce the appearance of fine and marked wrinkles. It also helps to minimise the visibility of spots and pores, giving a brighter complexion. It works in depth by nourishing the skin. It gives tone, vitality and renewed elasticity thanks to the synergy of active plant extracts and molecules that can support the epidermis in its self-regeneration processes.

MAIN INGREDIENTS

Retinol:

En A-vitamintype og et meget effektivt og multifunktionelt anti-rynkemiddel: elasticitet og hudton stimuleres, rynker reduceres og dannelsen af nye celler fremmes – hudens naturlige fornyelsescirkel.

Produktionen af collagen og elastin stimuleres, hudens volumen og tekstur genoprettes, og ansigtet remoduleres, så det kommer til at se yngre ud.

Liponsyre:

Liponsyre er et aktivt antioxidant og et hjælpestof i forbindelse med bekæmpelse af hudens ældning.

Det indeholder iltbindende stoffer og indgår i kroppens forskellige antioxidante mekanismer, såsom regenerering af C- og E-vitaminer samt CoQ10.

Ekstrakt fra *Acmella oleracea*:

Stoffet er kendt for sine naturlige botulinum-lignende egenskaber og betragtes derfor som en meget effektiv behandling mod ældning af huden og for reduktion af rynker. Det anvendes især mod smilerynker.

Det har en forebyggende og beroligende virkning.

Vitamin E:

Takket være indholdet af frie radikaler, som har en rensende virkning, beskytter E-vitamin huden mod udefrakommende påvirkninger (forurening, UV-A og UV-B), som kan være skadelige for huden og forårsage tidlig ældning.



MESO RETINOL DREAM

Opstrammer og gendanner
hudens volumen og struktur

Fordelene:

- Virker mod ældning af huden og reducerer rynker
- Forbedrer hudens tekstur og bindevæv
- Kraftigt virkende effekt mod dannelse af radikaler
- Forbedrer hudtone og fasthed
- Gør huden mere blød, hvilket giver et mere ungdommeligt udseende
- Reducerer hudlidelser og giver en mere jævn ansigtsfarve

Ingredienser:

- Vand
- Cetearylalkohol
- Kapryl-/kaprintriglycerid,
- Glycerin
- Butyrospermum parkii-smør
- Saft fra Aloe barbadensis-blade
- Propylenglycol, dicaprylylether
- Dimethicone
- Glycerystearat
- Phenoxyethanol
- Frugtolie fra *Olea europea* (oliven)
- Olie fra *Prunus amygdalus dulcis* (mandel)
- Olie fra *Linum usitatissimum* (hørfrø)
- Hvedeprotein fra Potassium palmitoyl hydrolyzed
- Ekstrakt fra *Acmella oleracea*
- Thioctsyre
- Tocopherylacetat
- Diglycerin
- Olie fra *Borago officinalis*-frø
- Retinylpalmitat
- Ethylhexylglycerin
- Dinatrium EDTA
- Parfume
- Ekstrakt fra *Pinus pinaster*
- Tokoferol
- Triethanolaminsalt
- Kaliumsorbit
- Natriumbenzoat, BHA, BHTN

Contents:

Æske = 1 lufttæt 50 ml flaske

Varenr.

MST131





Needling & Meso

Mekanisk hudbiostimulation



MESOPower® pen MP-5000

Det nyeste hudterapisystem

Side 45

MESO 3-Point Nano Modul

Til MESOPower® pen

Side 46

MESO 11-Point Micro Module

Til MESOPower® pen

Side 46

MESO 24-Point Non-traumatisk modul

Til MESOPower® pen

Side 47

MESO 36-Point Maxi Module

Til MESOPower® pen

Side 47

MESO POWER DEVICE MS-3

Transformationens kraft

Side 48

MESO HÅNDSTYKKE

Resultater med høj effekt

Side 50

MICROLIFTING MODUL

MESO modul med 18 stimuleringspunkter

Side 52

MICRONEEDLING MODULE

Patenteret microneedling modul

Side 53

NEEDLE ROLL 540

Mikro nåle med smertefri spids

Side 54

NEEDLE ROLL 540 RECHARGE

Mikro nåle med smertefri spids

Side 56

mesoskinline®



MESOpower[®] pen MP-5000

Det nyeste hudterapisystem!

MESOpower Pen® Ledningstilsluttet og trådløs 2-i-1

Designet af mesoskinline i Danmark

- Nålelængde 0,25 mm - 1,0 mm
- Hits pr. minut 18.000 RMP (op til 300 hits pr. sekund)
- To litiumbatterier (driftstid 6 timer, når de er fuldt opladet)

3D Innovation

MESOpower® pen er et specialudviklet, professionelt mesobehandlingshåndstykke med et ergonomisk design. Den kan justeres, så den passer til flere brugere, har energivisualisering i realtid og dobbelt innovativ teknologi med Smart Memory, der lever op til dine krav.

MESOpower® Pen er perfekt til en række anti-age-behandlinger, hvor serummer/mesococktails indføres i huden ved hjælp af blide trykbevægelser og vibrationer.

Det drejer sig bl.a. om:

- Non-invasiv mesoterapi
- Microneedling
- Microlifting

Trådløs og praktisk

Det professionelle håndstykke kan også bruges trådløst, hvilket er en mærkbar fordel for behandlere over hele verden. Transportér dit udstyr i en stilfuld aluminiumskuffert til det sted, hvor du udfører behandlingen – klinik, spa, messe.

Udfører du mange behandlinger om dagen? Bare rolig – batteriet kan oplades, mens du arbejder. Når batteriet er fuldt opladet (maks. 2 timer), kan det bruges i op til 6 timer uden afbrydelse.

Sikker og effektiv

Uanset land opfylder MESOpower® pen alle regler og krav til nålelængde. Det betyder, at den er sikker at bruge på ansigt og krop, hvor du kan justere nålelængden fra 0,25 mm til 1,0 mm i henhold til det område, der behandles, og formålet med behandlingen.

Nålemodul har en perfekt størrelse og er praktisk til behandling af smalle områder som omkring næse, øjenområde eller mundområde.

Hastigheden kan reguleres i 6 niveauer for at opnå en behagelig og passende behandling til enhver hudtype, hudtykkelse eller hudfølsomhed. Hastigheden kan justeres med 100-300 hit/sekund.

Hvert nålemodul er sterilt og pakket enkeltvis. Nålene i modulet er dækket med et aftageligt beskyttelseslåg af plast, så du undgår risiko for kontaminering under udpakning eller ved bortskaffelse af nålemodul.

3D individuelt drev

MESOpower® Pen består af 3 individuelle drevsystemer, som giver 3 gange beskyttelse af kernekomponenterne, forhindrer kontaminering af udstyret, forhindrer overophedning af håndstykket og opretholder det perfekte vibrationsniveau.

MESOpower® pen Technology

The MESOpower® Pen er den nyeste udvikling af microneedling-penne.

Teknologien har udviklet sig og erstatter brugen af rollers, som er runde redskaber med små nåle over overfladen, der rulles på huden for at forårsage mikroskader. Der findes andre, lignende produkter på markedet, herunder SkinPen eller Dermapen, men de er alle baseret på det samme koncept – at udføre kontrollerede og ensartede hudskader for at stimulere hudfornyelsen.

MESOpower®-pen kan endda behandle meget sarte områder, som ikke kan behandles med en roller. Når du udfører anti-age-behandling med MESOpower® pen, skal du holde den lodret mod huden og justere dybden og hastigheden af nålene på apparatet i henhold til det område og den hudtype, du behandler

MESOpower® pen MP-5000

Det nyeste hudterapisystem!

Specifikationer

- Elektrisk MESOpower®-pen med sterile engangs-nålemoduler
- Ergonomisk design og CE-mærket
- Nålestørrelser: 3/11/24/36 nåle pr. modul
- Needle number: 3/11/24/36 needles per module
- Adapter: 5 V, 1000 mA
- Hastighed: Maks. 300 hit/sekund
- Inkl. 2 genopladelige litiumbatterier, oplader, håndstykke bordholder, bærbar aluminiumskuffert og 40 nålemoduler.

Funktioner

- Automatisk hastighedsregulering med et enkelt klik (100-300 hit/sekund)
- Forskellige nålemoduler til stimulering af huden: til behandling af fine linjer, ar eller store områder
- Vibration og mild microneedling skaber perfekt biostimulation af huden, så den straks absorberer anti-aging-produkter under behandlingen og uden større læsioner
- Ingen downtime eller blå mærker
- Mere end 50 % forbedring af strækmærker og ar efter akne
- Bedøvelse med lidokain er ikke nødvendig
- Ikke-traumatisk behandling. Det er muligt at udføre behandlinger med 10-14 dages mellemrum.

Garanti

- 1 års garanti.

Indhold:

- 1 x MESOpower pen MP-5000
 - 2 x Genopladelige batterimoduler
 - 1 x Adapter til ledningsforbindelse
 - 1 x Power kabel
 - 1 x Bord holder til MESOpower Pen MP5000
 - 1 x Brugermanual på engelsk
 - 10 x 3-Point Microneedling Needle Moduler, Sterile
 - 10 x 11-Point Microneedling Needle Moduler, Sterile
 - 10 x 36-Point Microneedling Needle Moduler, Sterile
 - 10 x 24-Point Microlifting Plastik Moduler, Sterile
- Alt pakket i en eksklusiv bærbar aluminiumskuffert

Varenr.: MST2000

MESO 3-Point Nano Modul

(Til MESOpower® pen) Varenr: MST3001

Product description (1 box):

- 10 individuelt pakkede nålemoduler
- Steril og kun til engangsbrug
- Ultratynd 0,18 mm
- Rustfrit titaniumstål
- Steriliseret med gammastråler og til engangsbrug
- Produktionsdato, udløbsdato og LOT-nummer på hver nål
- Justerbar afstand mellem nålene og huden (0,25 mm-1,0 mm).

Ved hjælp af mikroperforeringer i huden indfører mikronålene de aktive anti-aging-ingredienser (mesoskinline mesococktails) og sikrer en naturlig og næsten smertefri celledfornyelse.

Celledfornyelsen efter en mesobehandling med microneedling gør huden fastere, forbedrer dens udseende og reducerer rynker og mindre skønhedsfejl.



MESO 11-Point Micro Module

(Til MESOpower® pen) Varenr: MST3002

Product description (1 box):

- 10 individuelt pakkede nålemoduler
- Steril og kun til engangsbrug
- Ultratynd 0,18 mm
- Rustfrit titaniumstål
- Steriliseret med gammastråler og til engangsbrug
- Produktionsdato, udløbsdato og LOT-nummer på hver nål
- Justerbar afstand mellem nålene og huden (0,25 mm-1 mm)

Ved hjælp af mikroperforeringer i huden indfører mikronålene de aktive anti-aging-ingredienser (mesoskinline mesococktails) og sikrer en naturlig og næsten smertefri celledfornyelse.



Et specielt Meso-microneedling 3-punkts modul til behandling af dybe linjer og efterligner rynker.

Det innovative 3-punkts Nano Modul er den mest avancerede kliniske microneedling-enhed på markedet. Med det avancerede modul kan du stimulere og åbne hudens øverste lag. Brug den sammen med passende mesoskinline cocktails eller lignende produkter

Modulet består af tre sikre mikronåle, som stimulerer hudens øverste lag (epidermis) på en skånsom og effektiv måde og samtidig sikrer nem adgang til vanskelige områder takket være dens lille størrelse og vipbare nåleplade.

Dobbelt effekt med MESO 3-punkts Nano Modul

Nålene danner usynlige mikroskopiske huller, som aktiverer hudens egen naturlige helingsproces og producerer mere kollagen og elastin. Det øger naturligt hudens spændstighed.

Imens flyder mesoskinline mesococktails ind i huden under behandlingen og ikke efter behandlingen (i modsætning til mange andre microneedling-behandlinger). Huden optager derfor alle vitaminer og aminosyrer fra produkterne optimalt, samtidig med at den fornyer sig selv.

Det forbedrer behandlingsresultatet med ca. 30 % og sikrer optimal absorption af de aktive ingredienser i de rigtige mængder og i de rigtige hudlag.

Eftersom hudbarrieren er blevet åbnet for de aktive anti-aging-ingredienser, absorberes yderligere aktive ingredienser fra MESO ANTI-AGE MASK, der anvendes efter behandlingen, mere effektivt.

Til mimiske rynker (til tynd hud & sensitive områder). Et klassisk rundt mikronålhoved til effektiv anti-aging behandling.

Det innovative MESO 11-Point Micro Modul er et af de sikreste og mest effektive nålemoduler på markedet. Med det avancerede modul kan du stimulere, aktivere og åbne hudens øverste lag. Takket passende afstand mellem nålene, bliver huden behandlet korrekt – uden risiko for ar dannelse.

Brug dette nålemodul på mimiske rynker, strækmærker eller acne-ar sammen med passende mesoskinline cocktails eller lignende produkter..

Sådan bruger du produktet:

Åbn den sterile sikkerhedspakke, og tag modulet ud. Pas på ikke at berøre nålene. Drej modulet ind i Meso Power-håndstykket, indtil det sidder fast, og fjern derefter plastsikkerhedshætten fra nålene.

Hold knappen „Turn on“ på håndstykket nede i 2 sekunder for at aktivere det, og juster nålelængden ved at dreje på håndstykket. Du kan ændre nålenes hastighed (tryk pr. sekund) med et enkelt tryk på „Turn on“-knappen.

Nu er du klar til at starte behandlingen. Behandl huden med vinkelrette bevægelser, og oprethold en 90° vinkel, som sikrer en jævn nåledybde og kun forårsager minimale læsioner i huden.

Forsigtig:

The following areas may not be treated with any type of needles: Open wounds, active acne, irritated skin, eczema, skin cancer, moles!

Et sikkert plastnålemodul, der er designet til at stimulere blod- og lymfekredsløbet og øge produktets indtrængen i huden med op til 97 %.

Med MESO 24-punkts non-traumatisk modul kan du effektivt behandle alle områder af huden med hyaluronsyre eller mesoskinline meso-cocktails.

Det innovative MESO 24-punkts non-traumatiske modul består af en plastplade med 24 stimulationspunkter (0,7 mm), som aktiverer hudens øverste lag (epidermis) på en mild og effektiv måde.

Dette er et særligt modul til non-invasiv mesoterapi, der anvendes til ansigt, krop og hovedbund. De 24 stimuleringspunkter absorberer de aktive mesoskinline meso-cocktails i huden, hvilket fører til naturlig celfornyelse.

Når du kører MESO 24-punkts non-traumatisk modul hen over huden, aktiverer du hudens naturlige helingsproces. Under helingsprocessen dannes der mere kollagen og elastin, hvilket gør huden mere modstandsdygtig. Det gør huden mere modtagelig for anti-aging- ingredienser fra de forskellige mesoskinline meso-cocktails.

Behandling af huden med MESO 24-punkts ikke-traumatisk modul kræver ikke bedøvelse og forårsager ikke synlig helings- eller skorpedannelse, og der er derfor ingen risiko for ardannelse eller hudskader. Selv sensitiv hud kan tåle non-invasiv mesoterapi-behandling med dette modul.

36-punkts modulet er det største i sortimentet og velegnet til behandling af dybe rynker, strækmærker, kirurgiske ar og ar efter akne.

Det innovative MESO 36-Point Maxi-modul er den mest avancerede kliniske enhed på markedet. Med det avancerede modul kan du stimulere og åbne hudens øverste lag. Brug den sammen med passende mesoskinline cocktails eller lignende produkter.

Modulet består af 36 sikre mikronåle, som stimulerer hudens øverste lag (epidermis) på en skånsom og effektiv måde og samtidig sikrer nem adgang til vanskelige områder takket være dets lille størrelse.

Nålemodulets funktion:

Mesoskinline-nålemoduler inkluderer alle typer moduler – fra det lille 3-punkts- til 36-maxipunktsmodulet.

Antallet af nåle baseres på det problemområde, der skal behandles, og sikrer den mest nøjagtige og egnede behandling, en behandler kan udføre.

Meget fine Ø 0,18 mm titaniumstål nåle kombineret med anti-agemesococktail tilfører huden de nødvendige sunde ingredienser og aktiverer kollagenproduktionen takket være mikroskaderne på huden.

Det kan punktere mere end 300.000 mikrohuller i hudens yderste lag på fem minutter, hvilket skaber et effektivt næringstilførsels-system mellem over- og underhuden.

MESO 24-Point Non-traumatisk modul

(Til MESOpower® pen) Varenr: MST3003

Produktbeskrivelse (1 æske):

- 10 individuelt pakkede nålmoduler
- Steril og kun til engangsbrug
- Specialdesignet modul med 24 x 0,7 mm pyramideformede stimulationspunkter i plast
- Steriliseret med gammastråler og til engangsbrug
- Produktionsdato, udløbsdato og LOT-nummer på hver nål
- Nålenes længde kan justeres (0,25 mm-0,7 mm)

Cellefornyelse efter non-invasiv mesoterapi-behandling resulterer i strammere hud, forbedring af hudens udseende, reduktion af rynker og mindre skønhedsfejl, aktivering af blodcirkulationen omkring hårfolliklerne efter mesoterapi mod hårtab.



MESO 36-Point Maxi Module

(Til MESOpower® pen) Varenr: MST3004

Product description (1 box):

- 10 individuelt pakkede nålemoduler
- Steril og kun til engangsbrug
- Ultratynd 0,18 mm
- Rustfrit titaniumstål
- Steriliseret med gammastråler og til engangsbrug
- Produktionsdato, udløbsdato og LOT-nummer på hver nål
- Justerbar afstand mellem nålene og huden (0,25 mm-1 mm)

Ved hjælp af mikroporeringer i huden indfører mikronålene de aktive anti-aging- ingredienser (mesoskinline mesococktails) og sikrer en naturlig og næsten smertefri celfornyelse.

Cellefornyelsen efter en mesobehandling med microneedling gør huden fastere, forbedrer dens udseende og reducerer rynker og mindre skønhedsfejl.





VYTAL POWER DEVICE MS-3

Multifunktionel udstyr

MESO POWER DEVICE MS-3 FOR PROFESSIONELLE

Med MESO POWER DEVICE MS-3 kan du tilbyde professionel non-invasiv mesoterapi og microneedling med optimal hygiejne og sikkerhed. Speciel designet styreenhed er fremstillet af høj kvalitet materialer og er beskyttet børstet aluminium. Den slanke styreenhed er fastgjort til det rustfrit stål design-udklipsholder ved hjælp af to små magneter. MESO POWER DEVICE MS-3 har et højt niveau af håndværk og dens ergonomiske håndstykke genererer næsten ingen støj eller vibrationer og passer let i hånden. Dens moduler kan betjenes med en hastighed på op til 150 slag / sekund. Enheden er kendt inden for klinisk microneedling og non-invasiv mesoterapi. MESO POWER DEVICE MS-3 er produceret i Tyskland med vægt på kvalitet, præcision og sikkerhed. Desuden har moduler en patenteret sikkerhedsmembran, som skaber de mest sikre rammer for både behandler og klient.

MESO POWER DEVICE MS-3 har mange fordele

- Sofistikeret og sikker klinisk microneedling og non-invasiv mesoterapi
- Engangs moduler med patenteret sikkerhedsmembran
- Velegnet til behandling af lysere og mørkere hudtoner (Fitzpatrick I - V)
- Nålenes længde kan justeres ved at dreje håndstykket
- Håndstykket når ikke meget høje temperaturer, selv efter langvarig brug.
- Ingen ablation eller synlig skade på huden
- Justerbar nålehastighed. Frekvensen kan indstilles til 11 niveauer, fra 50-150 NPS (nålelift pr. Sekund)
- Den valgte nålfrekvens vises digitalt
- Mulighed for tilslutning af et ekstra håndstykke
- Minimal regenereringstid på huden
- Lav risiko for PIH (Post-inflammatorisk hyperpigmentering)
- Lav støj og lav vibration
- Fremstillet i Tyskland af MT.DERM

CERTIFIKATER OG REGISTRATIONER GARANTI FOR KVALITET

MT.DERM lægger stor vægt på kvalitet og sikkerhed. Derfor er certificeringen af vores kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 13485 vurderet meget højt i vores firma. ISO 13485 er en standard, der repræsenterer kravene til et omfattende kvalitetsstyringssystem inden for udvikling, produktion, kundeservice og samling af medicinsk udstyr.

Vores certifikater (mikropigmentering / microneedling)

EG-certifikat: G1 17 05 67752 012

ISO 13485 Certifikat: Q1N 17 05 67752 011



MESO POWER DEVICE MS-3

Multifunktionel udstyr

Driftsbetingelser

- Omgivelsestemperatur: +10 ° C til +35 ° C
- Relativ luftfugtighed: 30% til 75%
- Bredde x højde x dybde: 230 x 45 x 185 mm
- Vægt af håndstykke: ca. 100 g
- Samlet vægt: 1100 g

Tekniske parametre

- Tekniske parametre
- Type: AD-1.3-MN-MP
- Nominel spænding: 15 V - (DC)
- Frekvens: 50 Hz
- Strømindgang: 5,7 V A maks
- Arbejdsfrekvens: kan vælges fra 50 - 150 hits / sekund
- Drev: precision DC motor
- Driftstilstand: kontinuerlig drift

Garanti

- 2 års garanti på maskine og håndstykke.



Indhold:

- MESO POWER DEVICE MS-3 enhed med LED display
- Vytal Meso håndstykke
- Fodpedal for at styre håndstykket
- Holder til håndstykket
- Brugervejledning på engelsk og tysk

Varenr.: MST201



VYTAL MESO HÅNDSTYKKE

Resultater med høj effekt

VYTAL MESO HÅNDSTYKKE

Produktinformation

Vytal Meso Håndstykke er specielt udviklet af MT Derm, til non-invasiv mesoterapi og microneedling. Håndstykket genererer næsten ingen lyd eller vibration og passer let i hånden. Microneedling og Microlifting moduler kan betjenes med en hastighed fra 50 op til 150 hits / sekund.

Vores høj kvalitets håndstykke har overbevisende præcision og stilhed. Sikkerhedsmembranen forhindrer tilbagestrømning af væsker og ingen risiko for kontaminering af håndstykket. Udvalg af microneedling nålemoduler og mesomoduler giver dig mulighed for at vælge passende nål til hver behandling. Passende nålestørrelse giver bedre resultater.

Hældningsnålpladen tilpasser sig til overfladen af huden = nålene følger hudoverfladen i jævn dybde med minimalt trauma i epidermis. De enkelte nåle giver højere indtrængningskraft og ingen smerte for klienten.

Fordele

Vytal Meso Håndstykke tilbyder alsidige muligheder inden for non-invasiv mesoterapi og microneedling.

- Non-Invasiv mesoterapi behandlinger og microneedling
- Behandling af acne arvæv
- Ingen ablation / dramatisk synlig skade på epidermis
- Lav risiko for PIH
- Behandling af hudtyper Fitzpatrick I - V
- Lav støj og vibrationer
- To års garanti
- Produceret Tyskland

Vytal Meso Håndstykke passer også til andre enheder som for eksempel:

- MESO POWER DEVICE MS-3
 - LaBina PL-1000 Mobil
 - LaBina PL-2000 Premium
- og andre lignende enheder.

Husk at vælge den rigtige ledningstilslutning. Hvis vi ikke har den der passer til din maskine, bedes du kontakte os.



VYTAL MESO HÅNDSTYKKE

Resultater med høj effekt

Følgende nålemoduler passer til VYTAL MESO HÅNDSTYKKE:

- Vytal Microneedling-module, 6-punkts nåleplade, Justerbar nålelængde - maks. 0,7 mm)
- Vytal Microlifting Module, 18-punkts plastnåle plade 0,5 mm

Garanti

- 2 års garanti på håndstykke.



Indhold:

- Pakke med Vytal Meso Håndstykke
- Tilslutningskabel

Varenr.:

CMN50X1: Håndstykke med (Firewire Plug)

CMN50X2: Håndstykke med (Jack Plug)

VYTAL MICROLIFTING MODUL

MESO modul med 18 stimuleringspunkter

Til MESO POWER DEVICE MS-3

Passer til: Vytal and og ligende håndstykker
MESO POWER DEVICE MS-3

Indhold: Pakke med 8 moduler
(18 x 0,5 mm plastik stimuleringspunkter)

Varenr.: EKNPA361805

ADVANCED and SYMPHONY MICROLIFTING MODUL

MESO modul med 18 stimuleringspunkter

Til LaBina PL-500 PL-1000 / PL-2000

Passer til: ADVANCED og andre ligende håndstykker
LaBina PL-1000 Mobil / LaBina PL-2000 Premium

Indhold: Pakke med 8 moduler
(18 x 0,5 mm plastik stimuleringspunkter)

Varenr.: E-MM0001

Passer til: SYMPHONY og ligende håndstykker
LaBina PL-500 Control

Indhold: Pakke med 8 moduler
(18 x 0,5 mm plastik stimuleringspunkter)

Varenr.: E-MM0020



Med Microlifting Module er det muligt at behandle alle områder af huden effektivt med hyaluronsyre og mesoskinline® meso-cocktails.

Modulet består af en plast plade med 18 stimuleringspunkter som aktiverer hudens øverste lag (epidermis) på en mild og effektiv måde. Dette er et specielt modul til non-invasiv mesoterapi, som bruges i ansigtet, på kroppen og i hovebunden.


De 18 stimuleringspunkter indsluser aktive **mesoskinline®** meso-cocktails i huden, hvorved der skabes naturlig cellefornyelse.

Cellefornyelse efter non-invasiv mesoterapi behandling medfører opstramning af huden, forbedring af hudens udseende, reducere af rynker og hudens ujævnheder, aktivering af blodcirkulation omkring hårsække ved mesoterapi mod hårtab.

Når man fører modulet hen over huden, aktiveres hudens egen naturlige helingsproces. Under helingsprocessen dannes der mere kollagen og elastin, som får huden til at blive mere spændstig.

Huden er hermed modtagelig for aktive anti-aging ingredienser, der tilføres fra de forskellige **mesoskinline®** meso-cocktails.

Behandling af huden med Vytal Microlifting Module eller med Vytal Microlifting Module kræver ingen bedøvelse og medfører ikke synlig heling eller skorpedannelse, hvorfor der ingen risiko er for ar eller hudskade. Selv sart hud tåler non-invasiv mesoterapi behandling med dette modul.

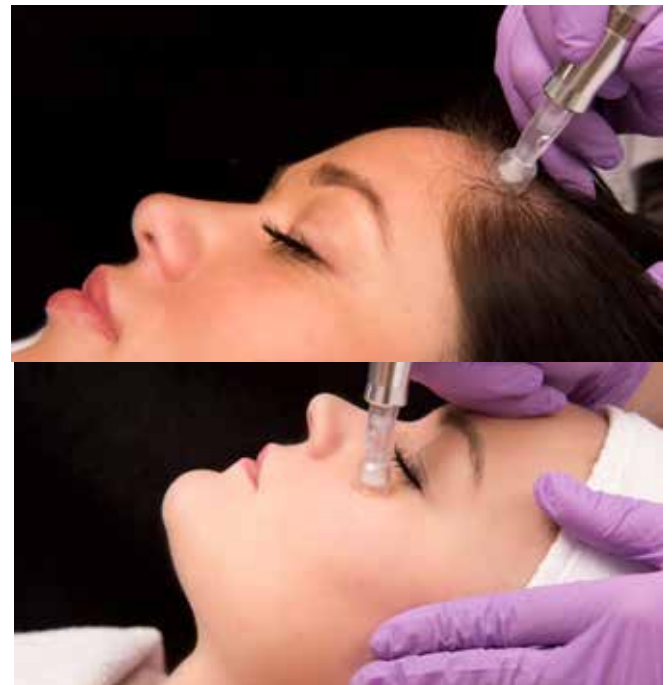

a:3:{s:5:"width";i:600;s:6:"height";i:596;s:4:"size";i:62567;}



Vytal and Advanced Microneedling Module

Microneedling Modul med nåleplade 6 x 0,3 mm eller 6 x 0,7mm nåle.

Afstanden mellem nålene og huden er justerbar.

- Med "state of the art" modulet er det muligt at stimulere, åbne det øverste hudlag og effektivt behandle individuelle dele af huden.
- Det benyttes sammen med egnede **mesoskinline**[®] meso-cocktails eller ligende produkter.
- Mest avancerede kliniske microneedling enhed på markedet
- Engangs sterielt nålemodul med patenteret sikkerhedsmembran
- Velegnet til behandling af alle hudfarver.

Med Modulet er det muligt effektivt at behandle alle områder af huden med hyaluronsyre eller med **mesoskinline**[®] meso-cocktails produkter. Modulet består af 6 sikre mikronåle, som stimulerer hudens øverste lag (epidermis) på en mild og effektiv måde. Mikronåle indsluser, via mikroperforeringer i huden, aktive anti-aging ingredienser (**mesoskinline**[®] meso-cocktails) og på denne nærmest helt smertefrie måde skabes den naturlige cellefornyelse. Cellefornyelse efter microneedling meso behandling medfører opstramning af huden, forbedring af hudens udseende, reducering af rynker og hudens ujævnheder.

Dobbel effekt med microneedling modulet:

Nålene laver usynlige mikroskopiske huller, der aktiverer hudens egen naturlige helingsproces, hvorved der bliver produceret mere kollagen og elastin. Dette øger naturligt hudens spændstighed.

Samtidig indsluses **mesoskinline**[®] meso-cocktails i huden allerede under behandling og ikke efter behandlingen, (som ved mange andre microneedling behandlinger). Huden optager derved optimalt alle vitaminer og aminosyrer fra produkterne under sin genopbygning.

Da hudbarrieren er blevet åbnet for aktive anti-aging- ingredienser, optages yderligere ingredienser effektivt fra MESO ANTI-AGE-MASKEN, der benyttes efter behandlingen. Dette forbedrer behandlingsresultatet med ca. 30 %. På den måde sikres en yderst høj optagelse af de aktive ingredienser i den rigtige mængde og i det rigtige hudlag.

VYTAL MICRONEEDLING MODUL

Patenteret microneedling modul

Til MESO POWER DEVICE MS-3

Passer til: Vytal og ligende håndstykker
MESO POWER DEVICE MS-3

Indhold: Pakke med 8 moduler
(6 x 0,3 mm metal nåle)

Varenr.: EMNPA360603

Passer til: Vytal og ligende håndstykker
MESO POWER DEVICE MS-3

Indhold: Pakke med 8 moduler
(6 x 0,7 mm metal nåle)

Varenr.: EMNPA360607

ADVANCED MICRONEEDLING MODUL

Patented microneedling module

Til LaBina PL-1000 / PL-2000

Passer til: Advanced and ligende håndstykker
LaBina PL-1000 Mobil / LaBina PL-2000 Premium

Indhold: Pakke med 8 moduler
(6 x 0,7 mm metal nåle)



Varenr.: E-MM0001

Fordele for klienten

- rødmen forsvinder kort efter behandlingen
- meget lav risiko for infektioner på grund af meget hurtige mikroperforeringer, så huden kan "lukke" sig med det samme
- ingen bivirkninger
- hurtig heling uden tydelige skader
- langvarige resultater

Fordele for professionelle

- udstyret med en sikkerhedsmembran for at opfylde de højeste hygiejnekrav
- maksimal ergonomiske moduler på markedet, da mikronåle er placeret på en vippeplade, som følger hudens form og hermed udføres mikroperforering jævnt og lige dyb
- sterile og kun til engangsbrug for at udelukke kontaminering
- patenteret og derfor garanterer høj kvalitet
- produceret i Tyskland efter de skarpeste regler og kontrol

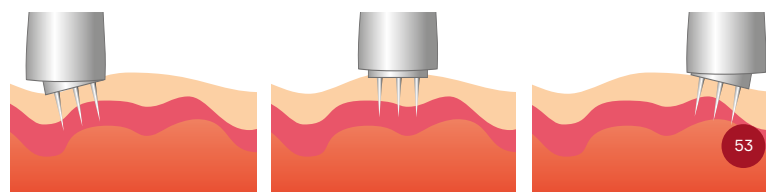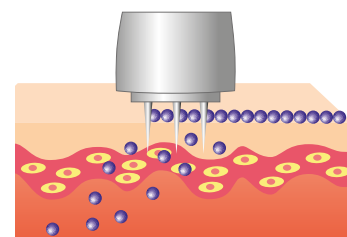



NEEDLE ROLL 540

Mikro nåle med smertefri spids



NEEDLE ROLL 540

Skin Needling er en regenerativ dermatologisk teknik. Den kan trygt udføres på alle hudfarver og hudtyper. Der er ingen risiko for efterfølgende inflammatorisk hyperpigmentering. Det er denne sikkerhedsfunktion, der adskiller Skin Needling fra andre invasive procedurer til behandling af rynker og ar.

Teknikken er baseret på et simpelt princip: Den normale helingsreaktion starter i det øjeblik, der sker skade på vævet. Blodkomponenter invaderer skadesområdet, og blodpladerne får kontakt til den ekstracellulære matrix.

Denne kontakt trigger blodpladerne, så de frigiver koagulationsfaktorer, essentielle vækstfaktorer og cytokiner. Når det skadede område er rensat, migrerer fibroplasterne til skadesområdet og producerer og afgiver ny ECM. Den nye kollagenmatrix bliver herefter tværbundet og organiseret i den sidste remodeleringsfase, som kan fortsætte, i op til 12 måneder efter at skaden er opstået.

Skin Needling med en skin roller producerer hundredvis af bittesmå skader i huden. Hver lille skade trigger den normale helingsproces i huden, og ved gentagne behandlinger opbygges nyt kollagen gradvist og udfylder dermed de dybe ar og linjer.

Generisk regenerativ ansigtsstimulering reducerer tegn på photo-aging og ansigtsrynker (bløde rynker)

NEEDLE ROLL 540

- Nåle fra 0,3 mm
- Generisk regenerativ ansigtsstimulering
- Reduktion af rynker
- Reduktion af strækmærker
- Reduktion af unormal pigmentering
- Reduktion af ar
- Reduktion af porøsitet

NEEDLE ROLL 540

Mikro nåle
med smertefri spids

Indhold: • (1 æske = 1 needleroll-ergonomisk håndtag + 2 needleroll recharges, 540 nåle)

Varenr.: Nr005

Nålehoveder/Recharges fås med 540 nåle i følgende længder:

0,3mm, 0,5mm, 1,0mm, 1,5mm, 2,0mm

Sterile engangshoveder bestående af 540 mikronåle i rustfrit stål

Needle Roll 540-hovedet med sine 540 mikronåle gør det muligt at dække et større penetrationsområde på kortere tid og kan generere 1000 mikrokanaler pr. kvadratcentimeter på ti minutter.



Derved øges effektiviteten af proceduren væsentligt.

Rustfrit stål er videnskabeligt bevist som værende guldstandard af værktøjer til penetrering af huden.

Needling Recharges har samme indgangsvinkel som subkutane nåle, mens Needle Roll 540 er diamantformet.

Beskyttelseskappen giver dig 100 % beskyttelse mod mulige smittekilder.

Det er korrekt professionel etik at bruge engangsnålehoveder for at reducere risici for infektioner.

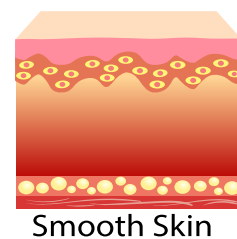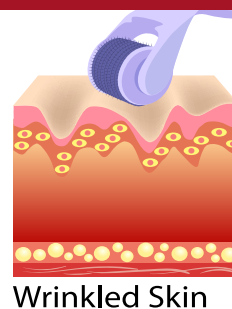

Before

After

NEEDLE ROLL 540 RECHARGE

Mikro nåle med smertefri spids

Indhold: Pakke med 6 stk. engangs nålehoveder med 540 nåle

Varenr.: Nr006
Vælg nålelængde
(0,3 mm, 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm)

NEEDLE ROLLER RECHARGE MED 540 NÅLEHOVEDER

Sterile nålehoveder til engangsbrug bestående af 540 mikronåle i rustfrit stål.

Med nåle på 0,5 mm

- Generisk regenerativ facial stimulus
- Reducer tegnene på billeddannelse
- Reduktion af ansigtslinjer (bløde rynker)

Med nåle fra 1,0 mm

- Generisk regenerativ facial stimulus
- Reduktion af rynker
- Reduktion af stregmærker
- Reduktion af unormal pigmentering
- Reduktion af ar
- Reduktion af porøsitet og kontrastens justering

NEEDLE ROLLER 540 NÅLEHOVEDER

540 mikronåle giver mulighed for at dække et større penetrationsområde på mindre tid og genererer 1.000 mikrokanaler pr. kvadratcentimeter på ti minutter, hvilket væsentligt øger effektiviteten af behandlingen. Det er videnskabeligt bevist, at rustfrit stål er guldstandard for værktøjer til hudgennemtrængning

Hovedet i NEEDLE ROLLER 540 NÅLEHOVEDER Recharge er udført i titanium med en ny type 200 mikronåle, hvilket gør det muligt at reducere smerte og ubehag i behandlingen sammenlignet med standard dermaroller med runde nåle.

Engangs nålehovederne reducere risikoen for infektioner.



0,3 mm



1,5 mm




0,5 mm



2,0 mm



1,0 mm

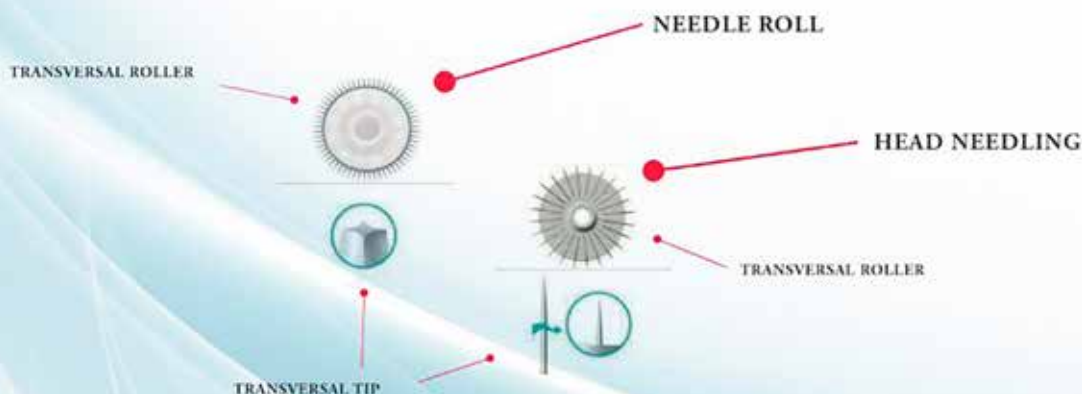

NeedleRoll
540

MICRO NEEDLES WITH PAINLESS TIP



Alle meso-cocktails er:

- TESTET PRODUKT TIL NON-INVASIV MESOTERAPI
- DERMATOLOGISKT TESTET

mesoskinline® meso-cocktails er produceret på følgende råmaterialer:

- | | |
|--|---------------------------------|
| • ARGININ | • LØGEKSTRAKT FRA ALLIUM CEPA |
| • ARGININ HCL | • MAGNESIUMGLUKONAT |
| • ASPARAGINSYRE | • MENTHLYNICOTINAT |
| • BIOTIN | • MENTOL |
| • CITRONSYRE | • METHYLSILANOL MANNURO-NAT |
| • CITRULLIN | • METYLSULFONYLMETAN |
| • DIMETHYLAMINOETHANOLBI-TARTRAT | • MONONATRIUMGLUTAMAT |
| • DINATRIUMEDETAT | • MÆLKESYRE |
| • DIPEPTID DIAMINOBYTYROYL BENZYLAMIDE DIACETATE | • NATRIUMBENZOAT |
| • EKSTRAKT AF CENTELLA ASIATICA | • NATRIUMHYDROXID |
| • EKSTRAKT AF PANAX GINSENG | • NATRIUMKALCIUMASKORBYL-FOSFAT |
| • EKSTRAKT FRA SAVPALMEF-RUGT | • NATRIUMLAKTAT |
| • ESTRAKT AF CHLORELLA VULGARIS | • NATRIUM-PCA |
| • ETHYLHEXYLGLYCERIN | • NIACINAMID |
| • FENYLALANIN | • ORNITHIN HCL |
| • GLUKOSAMIN HCl | • PANTHENOL |
| • GLUKOSAMIN-SULFAT | • PENTYLENGLYCOL |
| • GLUKOSE | • PHENOXYETHANOL |
| • GLYCERIN | • POLYKVATERNIUM-11 |
| • GLYCERYL LINOLEAT | • PROLIN |
| • GLYCERYL LINOLEAT | • PROPANEDIOL |
| • GLYCIN | • PROPYLENGLYCOL |
| • HAVVAND | • PYRIDOXIN |
| • HISTIDIN | • RETINYLPALMITAT |
| • HYALURONSYRE | • SERIN |
| • HYDROLYSERET ELASTIN | • SODIUMCHONDROITINSULFAT |
| • HYDROLYSERET HVEDEPRO-TEIN | • SORBINSYRE |
| • HYDROLYSERET KOLLAGEN | • SORBITOL |
| • HYDROLYSERET SOJAPROTEIN | • TETRANATRIUMGLUTOMATDIA-CETAT |
| • ISOLEUCIN | • THREONIN |
| • KALCIUMGLUKONAT | • TOCOPHERYLACETAT |
| • KALIUMGLUKONAT | • UREA |
| • KALIUMSORBAT | • VALIN |
| • LECITIN | • VAND |
| | • XANTHANGUMMI |
| | • ZINK-PCA |



Om mesoskinline® Non-invasiv mesoterapi

mesoskinline® er vores specialdesignede koncept indenfor mesoterapi og anti-age behandling - uden brug af medicinske indgreb og de risici, disse medfører. Vores koncept er baseret udelukkende på 100% sikre, testede og certificerede meso produkter og udstyr fra EU – det er din garanti for imponerende resultater.

Det er afgørende for os, at vore kunder føler tryghed ved de produkter og udstyr, vi tilbyder til behandling. Kun på den måde kan du give samme tryghed og tillid videre til dine kunder.

Kernen i **mesoskinline®** specialdesignede koncept består af:

- Dansk innovativ tænkning og vores sikre tilgang til behandlingsformer
- Tysk kvalitet og deres kompromisløse tilgang til at producere kvalitetsudstyr
- Italiensk fokus på skønhed og specialfremstillede formler til alle vore produkter

På baggrund af vores specialdesignede koncept er vi i stand til at tilbyde de bedst tænkelige behandlingsmuligheder med en sikkerhed for de resultater, vore kunder drømmer om.

Om mesoskinline® meso produkter til non-invasiv mesoterapi

Der findes efterhånden utallige anti-age serummer på markedet, som du sikkert allerede kender fra eksempelvis microneedling, laser- og ultralyds-teknologier. **mesoskinline®** meso-cocktails adskiller sig markant i sin formel fra de eksisterende.

Gennem mere end fem år har vi sammen med laboratorier og eksperter i Danmark, Tyskland og Italien, testet en række forskellige meso-cocktails til brug med den non-invasive metode.

Gennem vores tests er vi kommet frem til en kombination af ingredienser, der skaber de hurtigste resultater for vores kunder efter kun få behandlinger uanset alder, hudtype, genetik og alder.

På den baggrund har vi skabt en serie af målrettede produkter mod en række problemer – fine og dybe linjer i huden, ar, pigmentering, strækmærker, hårtab samt slap og dehydreret hud.

mesoskinline® meso-cocktails-formel er efterfølgende blevet testet og forbedret yderligere på et anerkendt italiensk laboratorium for at øge effektiviteten og synergien af ingredienserne. Det betyder en forbedret optagelse i huden og dermed også en forbedring af det endelige resultat



Salgs- og leveringsbetingelser

PRODUKT HOT-LINE

Hvis du har spørgsmål til vores produkter inden du bestiller **mesoskinline**® produkter, er du velkommen til at kontakte os.

Alle vore produkter indeholder allerede en teknisk instruktion til brugen.

Mere detaljerede oplysninger om vore produkter finder du på www.mesoskinline.com

Du kan ansøge om at blive oprettet som bruger på www.mesoskinline.com, således du kan se priser, rabatter og afgive ordre.

LEVERING OG LEVERINGSTID

Levering af ordrer sker normalt med TNT eller GLS, inden for 3-4 arbejdsdage efter at ordren er modtaget.

mesoskinline® påtager sig intet ansvar for overholdelse af den ønskede og forventede leveringstid.

I tilfælde af forsinkelse skal Køber reklamere straks.

Køber kan herefter alene hæve købet, såfremt Sælger ikke har leveret senest 10 hverdage efter skriftligt påkrav til Sælger fra Køber. Køber kan i intet tilfælde kræve erstatning som følge af forsinkelse.

FORSENDELSESOMKOSTNINGER

Alt køb til minimum kr. 2.500,00 er fragtfrit.

Ved køb under kr. 2.500,00 oplyses estimerede fragtomkostninger online på www.mesoskinline.com før endelig afgivelse af ordre. (Alle priser er netto).

PRISER

Alle angivne priser er uden gældende moms. Moms opkræves ikke til firmaer i EU uden for Danmark, der har et gyldigt momsnummer eller til købere i lande uden for EU.

De leverede varer forbliver vores ejendom, indtil alle krav mod køberen er afregnet.

mesoskinline® forbeholder sig ret til ændring af priser uden varsel.

BETALING

Betaling skal ske ved ordreafgivelse. Betaling kan ske med kreditkort, PayPal eller bankoverførsel.

Da **mesoskinline**® kun sælger til Distributører, forhandlere eller købere der bruger produkterne i erhvervsøjemed er der ingen afbestillings- eller fortrydelsesret.

GARANTI

For mangler på varer er garantiperioden 2 år fra levering af varerne til køber, dog ikke længere en dato for "Mindst holdbar til".

Tydelige mangler eller forkert forsendelse skal indberettes til **mesoskinline**® inden for 3 dage efter modtagelsen af varerne.

OPHAVSRET

mesoskinline® er varemærkebeskyttet og må kun bruges til reklameformål med skriftlig tilladelse fra **mesoskinline**®.

Det samme gælder for ethvert tekst- og copyrightbeskyttet billede, der bruges til reklameformål.

PARTNER ELLER DISTRIBUTØR

Er du interesseret i at samarbejde med **mesoskinline**® i dit land eller din region og blive partner eller distributør af **mesoskinline**®?

Kontakt os og hør om dine muligheder:

E-mail: sales@mesoskinline.com

www.mesoskinline.dk

mesoskinline®

MILANO - HAMBURG - COPENHAGEN *By Aleksandra Kjaersfeldt*

Hovedkontor, salg, distribution og showroom

mesoskinline[®]
mesoskinline ApS

Juelsmindevej 57
DK-7120 Vejle
Danmark

(+45) 71 74 11 08
sales@mesoskinline.com
www.mesoskinline.dk

Innovative
non-invasive
mesoterapi løsninger



mesoskinline[®]

MILANO - HAMBURG - COPENHAGEN *By Aleksandra Kjaersfeldt*